

# Használati útmutató



## Activ háromlábú bot

### **Az eszköz rendeltetése:**

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar.

A három láb révén a bot megáll a földön, így akik (idősek) járásukban bizonytalanok azoknak megfelelő biztonságérzett nyújt a bárhova elvihető támaszkodási lehetőség. Ajánljuk egyensúlyzavarban szenvedőknek, alsó végtag bénulásban szenvedőknek, időseknek, járásukban bizonytalanoknak.

A támbot magassága állítható. Anyaga acél cső, a markolat műanyag, csúszásgátló botvéggumival ellátott.

### **Beállítás, első használat:**

Az első használat előtt a támbot magasságát be kell állítani, ehhez a rögzítő klipszet ki kell húzni, majd az új pozícióban vissza kell tenni, úgy, hogy a klipsz acél csapja az összes furaton átmenjen.

A támbot magassága akkor megfelelő, ha használat közben a markolat, csípő, csukló magasságban van.

Terhelhetőség: 100 kg

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

Az eszköz karbantartást nem igényel.

### **Figyelmeztetések:**

Elkopott botvéggumival a támbot használata veszélyes lehet, hiszen megnő a kicsúszás veszélye. Az elkopott botvéggumira a használatkor hallható kopogó hang, hívja fel a figyelmet.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.