

Szerviz egységek:

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/1 783-3869
Tel.: 06/20 950-4735 Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137 Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196 Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43. Tel.: 06/1 230-0593



Használati útmutató

B-4258

Négykerekű, fékezhető, összecukható járókeret



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

1. Felhasználási terület:

A B-4258 négykerekű, fékezhető járókeret nagymértékben segíti mindazok önálló közlekedését, bevásárlását, mindennapi életét, akiknek csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő járásbiztonság eléréséhez, gyengeség, egyensúlyzavar esetén és képesek a fémkarokat működtetni. A felszerelt ülőke a járás közbeni pihenést szolgálja.

2. Használat


A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas. A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) tanácsát kell figyelembe venni.

Ha a járókeretet előszereltnél állapotban kapta meg, azt használat előtt **össze kell szerelni**. A vázcső záródugóját eltávolítva helyezze be a toló karokat a vázcsőbe. Helyezze be a szorító csavarokat a bilincsbe, úgy, hogy a csavarfején lévő háromszög helyező lap a bilincs furataiba illeszkedjen.

A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy állítsa be, hogy a keretben állva a könyökök kissé hajlítottnak legyenek, de ne nyomják fel magásra a vállat. Ne állítsa a toló karokat olyan magasra, hogy a csövön lévő sima felület kilátszódjon. A rögzítő csavarokat húzza meg. Állítsa be a fémhuzalok feszességét a huzalokon található csavarok segítségével. Ellenőrizze a fék megfelelő működését.

Összecukáshoz egyik kezével hajtsa fel a piros színű biztosító lemezt, a másik kezével fogja meg a kereszt csövet és egy hirtelen mozdulattal húzza azt fel (1. ábra).

Szétnyitáshoz fogja meg hátsókerék csöveit, úgy hogy a hüvelykujjait megtámasztja a váz csövén, majd a hátsókerék csövet húzza hátra, ahogy a 2. sz. ábra mutatja. A teljes szétnyitáshoz a keresztcsövet nyomja le ütközésig, úgy hogy a biztosító piros színű lemez függőleges helyzetbe be tudjon állni, ahogy a 3. ábra mutatja.

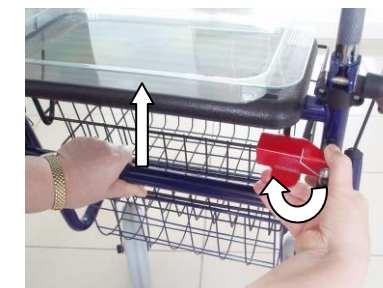

1. ábra



2. ábra



3. ábra

Levágandó jótállási szelvények Az ELADÓ tölti ki!		Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	3	Bejelentés időpontja.....	3
Típus: B-4258		Megjavítás időpontja:.....	
Gyártási szám:		Bejelentett hiba:.....	
Kelt:.....20.....hó.....nap		Elhárított hiba:.....	
Eladó:.....		A jótállás új határideje:.....	
aláírás (P.H.)		Munkalapszám:.....	
		Kelt:..... 20.....hó.....nap	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	2	Aláírás (P.H.)	
Típus: B-4258		Bejelentés időpontja.....	2
Gyártási szám:		Megjavítás időpontja:.....	
Kelt:.....20.....hó.....nap		Bejelentett hiba:.....	
Eladó:.....		Elhárított hiba:.....	
aláírás (P.H.)		A jótállás új határideje:.....	
		Munkalapszám:.....	
		Kelt:..... 20.....hó.....nap	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	1	Aláírás (P.H.)	
Típus: B-4258		Bejelentés időpontja.....	1
Gyártási szám:		Megjavítás időpontja:.....	
Kelt:.....20.....hó.....nap		Bejelentett hiba:.....	
Eladó:.....		Elhárított hiba:.....	
aláírás (P.H.)		A jótállás új határideje:.....	
		Munkalapszám:.....	
		Kelt:..... 20.....hó.....nap	

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy szétnyitáskor és összecsukáskor a keze, ujjá ne szoruljon a mozgó alkatrészek közé!

Amennyiben rövid időre megáll, húzza fel a markolat alatt található fék fékkarjait, megakadályozva a járókeret elgurulását. A hosszabb ideig történő álláshoz vagy az ülőke használatakor a fékkar lenyomásával fékezett állapotban tudja tartani a járókeretet. A kényelmét szolgálja a járókeret jobb oldalán található bottartó, a levehető műanyag tálca és a szintén levehető bevásárló kosár.



FIGYELEM!

- **A féket minden leülés előtt rögzíteni kell, a járókeret elgurulását meg kell akadályozni. Elindulás előtt a féket ki kell oldani.**
- **A járókeret oldalirányban nem terhelhető!**
- **A járókeretet sík szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot.**
- **A járókeretet ne használja úgy, hogy rajta ül és a lábával tologatja magát!**
- **Zsíros, vizes, krémes kézzel ne használja a járókeretet!**
- **A fékkarokra ne támaszkodjon, mert azok eltörhetnek, csak fékezésre használja!**
- A magassági méret szabályozására szolgáló bármelyik rögzítő csavar meghibásodása, a markolat megsérülése, hibás fékrendszer, sérült kerék esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!!
- Hibás fékrendszer esetén a járókeret nem használható!
- Hibás reteszelő szerkezettel az eszközt használni TILOS!
- A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Jó meghúzásuk szükséges.
- Minden használat előtt a fékek hatékonyságát ellenőrizni kell!
- A járókeret túlterhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

3. Karbantartás, tárolás

3.1. Tisztítás

A járókeretet karcmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillal áttörölni. A bot minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető!

3.2. Tárolás

A járókeretet összecsukott állapotban fektetve lehet tárolni!

3.3. Karbantartás

A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsukást biztosító szerkezet, valamint az összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, utánhúzása szükséges.

3.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

4. Jellemző méretek, adatok

Maximális méret (hossz x szélesség): 640 x 590 mm
Összecsukott méret (hossz x szélesség): 590 x 590 mmmm
Markolat magasság: 780—900 mm, fokozatmentesen állítható
Kerék méret: 200 mm
Tömeg: 11 kg
Kosárba helyezhető max. teher: 5 kg
Felhasználó max. megengedett tömege: 110 kg

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészt építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

REHAB Zrt.

A **MEDORT** csoport tagja.



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330