

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BUGGY PRIM

GYERMEKKOCSI



szimbolikus fotó

Figyelem!

Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy:

- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!
- Mind a gyermek neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás!

A gyermekkosci - mint gyógyászati segédeszköz - **szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata és kötelessége.** Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabály által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a gyermekkosci jótállásban javítandó hibájának.

Kedves vásárlónk!

A "BUGGY PRIM" kategóriájában egyedülálló gyermekkocsit kifejezetten mozgássérült gyermekek számára fejlesztették ki, melyben a gyermek hosszabb időt is eltölthet. A gyermekkocsihoz nagy választékban rendelhetők speciális rögzítő alkatrészek, ezért különböző sérülések széles skáláján is jól használható. Használat előtt kérjük, olvassa el a **használati útmutatót**.

Amennyiben az eszköz használatával kérdése merülne fel, keresse fel szakembereinket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- ❖ használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót
- ❖ biztonsági okokból használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az állítócsavarok, illetve a rögzítőelemek fix állapotban vannak.
- ❖ használatához kérje ki orvos szakvéleményét
- ❖ az eszköz használójának ismernie kell az ebben a tájékoztatóban leírtakat
- ❖ elindulás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek kényelmesen ül, ruha vagy egyéb tárgy a kerekek útjába nem került
- ❖ álló helyzetben, valamint be- és kiszálláshoz a kerekeket minden esetben rögzítse
- ❖ járdára hajtás esetén soha ne döntse előre a széket
- ❖ a széket buszon, illetve egyéb járműveken a gyermek szállítására ne használja
- ❖ tilos járműben ülésként használni, ülésként lekötni
- ❖ ügyeljen, hogy a gyerekek ne használhassák játékként az eszközt
- ❖ ne használja az eszközt rendeltetésétől eltérően
- ❖ szállítás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek testrészei mozgó alkatrészekhez nem érnék
- ❖ a gyártó nem vállal felelősséget mások által gyártott tartozékok használatából eredő balesetekért, károkért
- ❖ használat közben legyen figyelmes, hogy elkerülje az ütközéseket és egyéb veszélyhelyzeteket
- ❖ ügyeljen a háttámla és az ülés beállításánál a hirtelen mozdulatokra
- ❖ ne engedje, hogy a gyermek felügyelet nélkül szálljon ki-, illetve be a kocsiba
- ❖ ne terhelje túl a kocsit csomagokkal, több gyermekkel, nem eredeti tartozékokkal

- ❖ ügyeljen arra, hogy a rögzítő tartozékok mindig a gyermek méretére legyenek beállítva, és rögzítve. A használonak ezek kezelésével tisztában kell lennie.
- ❖ ügyeljen, hogy a gyermek soha ne álljon a lábtartóra, mivel nem ekkora terhelésre tervezték
- ❖ **soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban**
- ❖ A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért sem a gyermek, sem a használó, sem harmadik személy tekintetében.

FIGYELMEZTETÉS

A fogantyúra akasztott tárgyak befolyásolják a kocsi stabilitását. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban tartózkodni. Beállítás közben az ujjait tartsa távol a teleszkópoktól.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

A kocsi kinyitása

Helyezze az összecukott kocsit a kerekeire, majd álljon a hátsó kerekek közé, és fogja meg határozottan a fogantyút. Húzza felfelé a fogantyút, amíg nem rögzül biztonságosan a helyén. Felfelé húzással ellenőrizze, hogy a rögzítés megtörtént. A kocsi nem csukódhat össze.

FIGYELJEN, HOGY KINYITÁS KÖZBEN AZ UJJA NE SÉRÜLJÖN MEG!

Háttámla lehajtás

Fogja meg erősen a széket. Oldja ki a háttámla rögzítését, majd állítsa be a háttámlát, és rögzítse.

Talptámasz magasságállítás


Fogja meg a lábtartót, lazítsa ki a lábtartó rögzítőcsavarjait, állítsa be a kívánt magasságot, majd mindkét oldalon húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Lábtartó hátradöntés

Nyomja meg mindkét oldalon a kioldó gombot, állítsa be a dőlésszöget, majd engedje el a gombot a lábtartó megfelelő pozíciójában.

Rögzítőfék


A kerekeken található fékkarokat teljesen nyomja le. A fék kioldásához emelje fel a fékeket összekötő rudat.

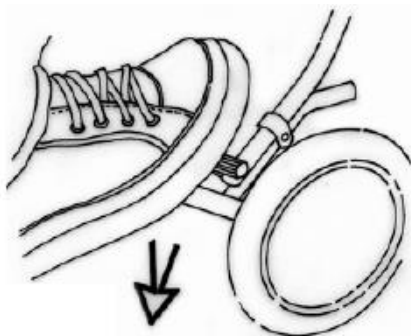

Beszállás

Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannak-e. Ha lehetséges, a széket állítsa háttal a falnak, vagy egyéb, nem mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy segítő is tarthatja a széket a beszállás alatt).

Hajtsa a lábtartót lehetőség szerint függőleges állásba, és hajtsa fel. Ültesse a gyermeket a székbe, rögzítse az övekkel, illetve egyéb rögzítő eszközökkel, majd rögzítse a biztonsági rudat, és állítsa be a lábtartót. Figyeljen, hogy a gyermek kényelmesen üljön.

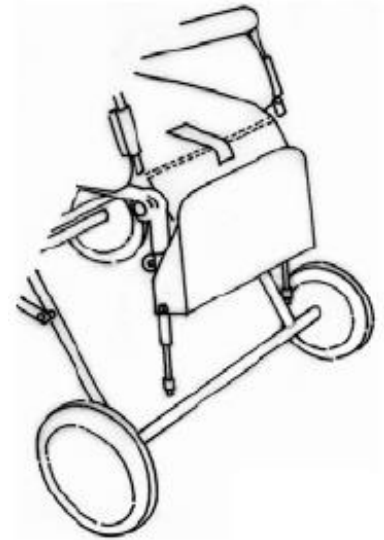

Kiszállás

Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannak. Ha lehetséges, a széket állítsa háttal a falnak, vagy egyéb, nem mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy segítő is tarthatja a széket a kiszállás alatt).

Hajtsa a lábtartót lehetőség szerint függőleges állásba, és hajtsa fel. Oldja az öveget, illetve egyéb rögzítő eszközöket, majd vegye ki a biztonsági rudat, és óvatosan emelje ki a gyermeket.

Járda / egy lépcsőfok

Ha járdáról, vagy egy lépcsőfokról lefelé kíván haladni, tolja a kocsit az első kerekeivel a járda / lépcső széléig, határozottan fogja meg a fogantyúkat, és döntse enyhén hátra a széket a hátsó kerekeire. Tolja a hátsó kerekeken a széket lassan a járda szélére, majd óvatosan eressze le az út szintjére. Soha ne döntse a széket előre!

Ha járdára vagy egy lépcsőfokra kíván felmenni, óvatosan döntse hátra a széket, az első kerekeket tegye fel a járdára, majd tolja előre, és emelje fel a hátsó kerekeket is a járdára.

Lépcső

Ha lehetséges, liftet vagy rámpát használjon. A lépcsőt csak akkor használja, ha nincs más lehetőség. A lépcsőn való közlekedéshez legalább egy segítőre lesz szüksége.

Soha ne próbálja meg a széket a lépcsőn egyedül fel, illetve levinni, ha Ön és segítője nem biztosak benne, hogy az eszközt és a gyermeket magabiztosan elbírják, a széket biztonsággal meg tudják fogni.

Emelésnél a fogantyút minden esetben fogni kell!

Soha ne emelje fel a széket a biztonsági korlátnál vagy a lábtartónál!

Lefelé haladáshoz tolja a széket a lépcső széléhez, óvatosan döntse hátra a hátsó kerekre, majd tolja lassan a lépcső széléhez.

A segítő fogja meg a keret első részét, kicsit emelje meg, és tartsa addig, amíg a hátsó kereket óvatosan a következő lépcsőfokra engedik.



Az eljárást ismételjék a lépcső aljáig.

Felfelé haladáshoz a hátsó kerekkel álljon az első lépcsőfok elé, döntse óvatosan hátra, majd a segítő emelje meg az első részt a keretnél fogva, miközben a következő lépcsőfokra emeli a hátsó kerekeket.



A kocsi összecukása

Oldja a rögzítő féket a hátsó kerekeken. Állítsa a lábtartót közel 45°-os szögbe, szerelje le a biztonsági rudat, hajtsa fel a lábtartó vízszintes részét, és oldja a kárpitot rögzítő hevedereket. Az ábrákon látható módon hajtsa a támlát az ülésre, amennyire csak lehet (javasoljuk, hogy a tartozékokat szerelje le), majd oldja a fogantyú rögzítését, és hajtsa az első kerek felé a tolókart. **Ügyeljen, hogy a lábtartó ne feszüljön be a váz többi részével, mert az az állító csukló töréséhez vezethet.**

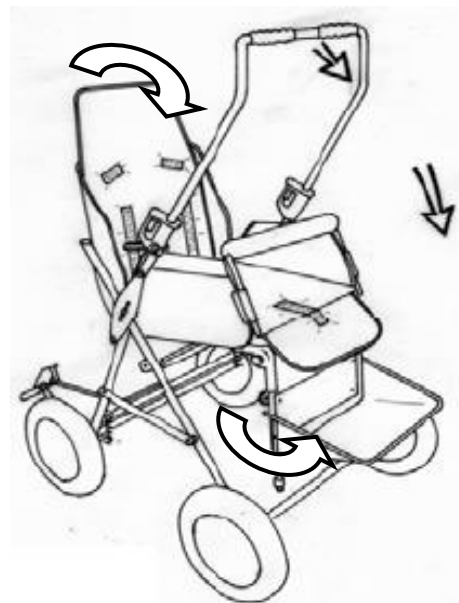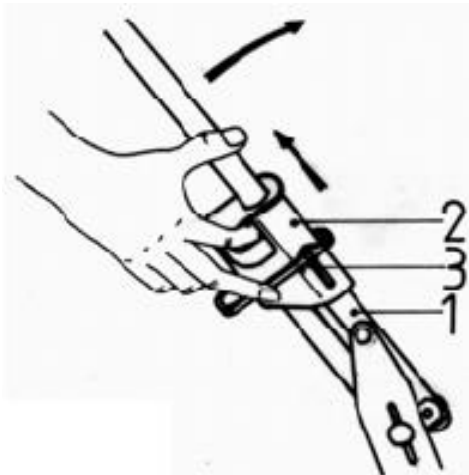

Üléskárpit

A kárpitozás teljesen leszerelhető, és maximum 40 fokon mosható.

Háttámla kárpit

Hajtsa át a kárpitot a háttámla váz tetején, és csúsztassa a kárpit alsó részét a támla és az ülés közötti részbe. A tépőzárak segítségével rögzítse a kárpit alsó részét.


Karbantartás

Ezt a gyerekkocsit úgy tervezték, hogy a megfelelő használat és karbantartás mellett évekig hibátlanul használható legyen. A gondtalan használat érdekében végezze el az alábbiakat:

- ❖ rendszeresen ellenőrizze a fogantyút, a biztonsági korlát rögzítéseit, a zárat, a lábtartót, a csatlakozókat, hogy megfelelően működnek.
- ❖ a fékek, kerekek illetve abroncsok a használat során kophatnak, ezeket szükség esetén ki kell cserélni
- ❖ javasoljuk, hogy az eszközt évente nézesse át szakemberrel
- ❖ amennyiben az eszköz meghibásodik, kizárólag az erre felhatalmazott szerviz végezhet javításokat az eszközön
- ❖ csak eredeti alkatrészek használhatók a javításhoz
- ❖ amennyiben az eszköz egyes részei szorulnak, vagy nehezen működnek, bizonyosodjon meg róla, hogy nem valamilyen szennyeződés okozza ezt, és alkalmazzon egy kevés kenőanyag spray-t (pl. WD40). Ne használjon zsírt vagy olajat. Ügyeljen, hogy a megfelelő alkatrészek közé jusson elegendő kenőanyag, de ne használjon túl sokat ezekből, mert ez szennyeződést okoz. A fölösleges anyagot mindig törölje le.
- ❖ A rendszeres kenés meghosszabbítja az élettartamot, és könnyebb kezelhetőséget biztosít.
- ❖ Ismerje meg az eszköz használatát alaposan. Minden esetben könnyedén kell szétnyílnia, illetve összecukódnia. Soha ne erőltesse az alkatrészeket, mindig olvassa el a használati útmutatót!
- ❖ a kerekek, a fém és műanyag alkatrészek semleges mosószerrel, kézmeleg vízzel tisztíthatók
- ❖ a kárpit 40 °C-on mosógépben mosható. További információk a kárpit címkéjén találhatóak.
- ❖ soha ne használjon erős tisztítószereket, alkoholt, ammónia vagy klór tartalmú anyagokat.
- ❖ amennyiben az eszközt nedvesség éri, törölje át száraz ruhával, és nyitott állapotban jól szellőző, meleg helyen hagyja megszáradni
- ❖ minden esetben száraz, biztonságos helyen tárolja az eszközt.
- ❖

A gyártó fenntartja a jogot az ezen útmutatóban foglaltak, illetve a termék megváltoztatására előzetes jelzés nélkül.

A kocsi főbb részei

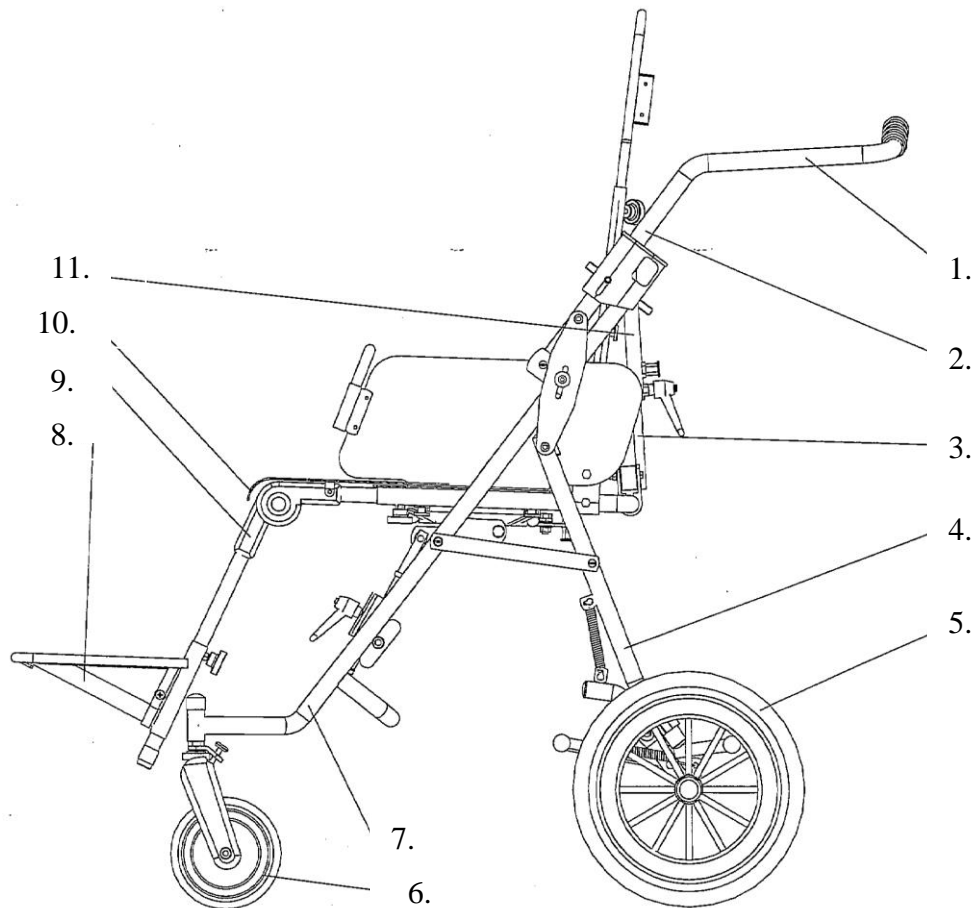

- 1. tolókar
- 2. háttámla
- 3. háttámla dőlésállító
- 4. hátsó vázkeret
- 5. fékezhető hátsó kerék
- 6. első, bolygókerék

- 7. első vázkeret
- 8. talptámasz
- 9. lábtartó csuklópánt
- 10. ülőlap
- 11. reteszelő

Műszaki adatok

	S (Mini)	M (Standard)	L (Maxi)
Háttámla magassága (mm)	530	630	710
Ülés szélesség (mm)	300	340	370
Ülés mélység (mm)	250	280	360
Ülés - lábtartó távolság (mm)	190-330	190-330	220-380
Háttámla dőlésszöge	0 - 165°	0 - 165°	0 - 165°
Ülés dőlésszöge	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°
Teljes hossz (mm)	1020	1020	1040
Teljes szélesség (mm)	580	580	620
Teljes magasság, fogantyúval (mm)	1045	1045	1080
Tömeg (kg)	15	17	18
Maximális terhelhetőség (kg)	35	35	50
Hossz összecukott állapotban (mm)	940	940	940
Szélesség összecukott állapotban (mm)	580	580	620
Magasság összecukott állapotban (mm)	430	430	430
Első kerék mérete	200x50-7	200x50-7	200x50-7
Hátsó kerék mérete	300x45-3	300x45-3	300x45-3


Tartozékok

Napvédő (RPRK00107) - csak rendelésre

Rögzítés: a háttámla keretére szerelje fel a napvédő tartóelemeit, majd szerelje fel aznapvédőt.


Leszerelés: oldja a napvédő rögzítéseit, és emelje ki a napvédőt a tartóból.

Beállítás: húzza fel vagy nyomja le a napvédő tetejét. A napvédő oldala letekerhető az oldalsó védelem beállításához.

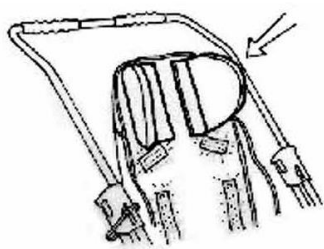


Fejtartó

A fejtartót a gumis szalagokkal rögzítse a háttámla felső részéhez.

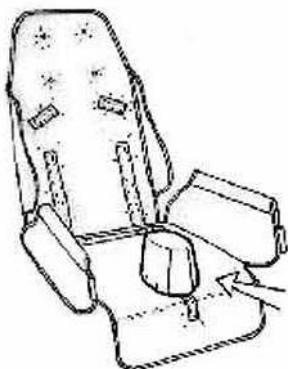

Terpesztő ék

Ültesse a gyermeket a székbe, majd keresse meg a terpesztő ék megfelelő helyét. Vegye ki a gyermeket a székből, keresse meg a vázon a rögzítő lyukat, majd helyezze be a blokkot és rögzítse egy anyacsavarral (a keskenyebb rész nézzen a lefelé).

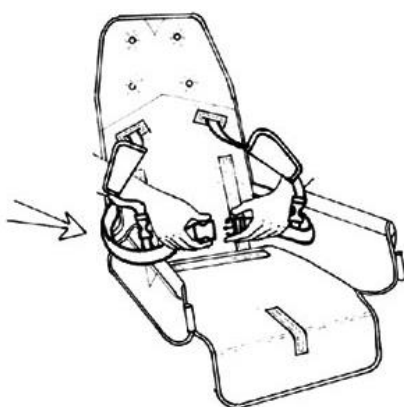

Négyponthoz biztonsági öv

Rögzítés: oldja a tépőzárát, a háttámla alsó részénél vezesse hátra és a tépőzárral kösse össze. Az öv felső szalagjairól vegye le a műanyag csatot, dugja át a háttámlán kiképzett résekben. Hátul fűzze fel a csatot mindkét szalagra.



Beállítás: oldja mindhárom rögzítőt, ültesse a gyermeket a székbe, majd állítsa be az övek hosszát. A gyermeknek az öv nem okozhat kényelmetlenséget.

I. JÓTÁLLÁS

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott termékekre. **A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.**

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, áruszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá válik.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt következett be,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből, felborulásból származó sérülésekből következett be (pl.: váz sérülése),
- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után keletkezett okból következett be

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:

- a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, a gumik (köpeny és tömlő), üléskárpit-, karfakopás és sérülés.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:

- A terméken a jótállást vállaló szervén kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.
- A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
- A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett terhelést.
- Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
- A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

Szervizek

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a használati útmutató végén található **Szervizkönyvben** feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
- a főszervelécek cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Gyártó:

PATRON Bohemia s.r.o.

Ceskolipska 3419, CZ-27601 Melnik, Czech Republic

Tel.: (+420) 315-630-135, 315-630-111, Fax: (+420) 315-630-199

Forgalmazó:

Rehab Zrt.

A **MEDORT** csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út. 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330



Management
System
ISO 9001:2008
Valid until:
2016.12.10

www.tuv.com
ID: 9105076580

**A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:**

SZERVIZKÖNYV

..... gyártási számú kerekesszékhez

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606
	Tel.: 06/1 783-3869
	Tel.: 06/20 950-4735
	Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137
	Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7196
	Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.	Tel.: 06/1 230-0593
---	---------------------

MEDIPLUSZ KFT.

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.	Tel.: 06/74 413-238
---------------------------------------	---------------------

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Gyermek kocsi

Az eszköz típusa: Buggy Prím

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetészerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jótállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY Buggy Prím Gyermekkekcsihoz	TAJ szám:
Eladószerv tölti ki!		
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre (szerviz tölti ki)		Levágandó jótállási, javítási szelvények (eladó tölti ki)
Bejelentés időpontja: 5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5	
Bejelentett hiba:	Típus: Buggy Prím gyermekkecsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4	
Bejelentett hiba:	Típus: Buggy Prím gyermekkecsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	
Bejelentett hiba:	Típus: Buggy Prím gyermekkecsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	
Bejelentett hiba:	Típus: Buggy Prím gyermekkecsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	
Bejelentett hiba:	Típus: Buggy Prím gyermekkecsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		