

Használati útmutató



Activ fürdőkád kapaszkodó

Az eszköz rendeltetése:

Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedőknek. A termék a fürdőkádban való megcsúszás ellen véd, mivel a ki és belépésnél bele lehet kapaszkodni. A csúszós felületeken való mozgás biztonságát növeli. A kád széléhez csavarozható. Anyaga szinterezett acél cső.

Beállítás, első használat:

Az első használat előtt a kapaszkodót fel kell szerelni a kád szélére. Erre a hagyományos beépített kádak alkalmasak, amelynek külső oldala csempés.

1. Amennyire lehet, ki kell csavarozni a rögzítőket
2. A kapaszkodót fel kell helyezni a kád szélére úgy, hogy a rögzítők a kád oldalát közre fogják. A gumiütközőknek kell a kád külső oldalához kerülniük.
Olyan helyre kell helyezni, ahol karnyújtásnyi közelben van a kádba való be és kilépéskor, de nem akadályozza a be és kilépést, a kádban való tartózkodás során nem jelent akadályt sem a tisztálkodó ember, sem pedig az őt segítő számára.
3. Meg kell húzni a rögzítőket
4. Ellenőrizni kell, hogy a kapaszkodó nem csúszik-e el.
 - a. Ha elcsúszik, jobban meg kell húzni a rögzítőket, erősebben kell becsavarni őket
 - b. Ha ezek után is elmozdul a kapaszkodó, hívjon szakembert, aki segít a felszerelésben.

Terhelhetőség: 100 kg

Karbantartás, állagmegóvás:

A termék karbantartást nem igényel. A kád tisztítása idejére jó, ha leszerelik.

Figyelmeztetések:

- Időnként ellenőrizze, hogy a kapaszkodó nem mozdult-e el a helyéről akár ön, akár hozzátartozója használja a kapaszkodót.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Garancia:

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.