

Köszönjük, hogy kiváló minőségű svájci Bernafon hallókészülékünket választotta!

Használati utasítás tisztítási, kezelési leírás



Készülékére a vásárlás napjától számított 12 hónap garancia érvényes, mely a kivitelezési és anyaghibákból eredő károokra érvényes. A hallókészülék nem rendeltetésszerű - nem a használati utasításnak megfelelő - használatából, vagy a nem megfelelő tisztításból eredő károsodásokra nem terjed ki a garancia. Ugyancsak nem tartozik a garanciális hibák közé a nem megfelelő (nem hallókészülékbe való) elemek használata.

Amennyiben készülékével kapcsolatban bármiféle meghibásodást észlel, kérjük ne nyúljon annak belsejébe és ne próbálja meg megjavítani azt, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Készülékét küldje vissza az Önhöz legközelebb lévő üzletünkbe, vagy juttassa el bármelyik partnerünkhöz.

A Bernafon hazai forgalmazója: Yarus Trade Kft.



Szaküzleteink:
1074 Budapest, Huszár u. 8.
1035 Budapest, Vörösvári út 35.
9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 4.
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 52.
8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 65.

Készülékével kapcsolatban bővebb felvilágosítást szaküzleteinkben, illetve partnereinknél kaphat.

Smile+
310,
320,
321



típusú hallókészülékhez

Mielőtt használatba veszi a készüléket, olvassa el a használati utasítást és a mellékelt tápellátást. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e, és hogy a fülbevaló megfelelően van-e behelyezve. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a fülbevaló megfelelően van-e behelyezve. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a fülbevaló megfelelően van-e behelyezve.

Bernafon Smile+ 310, 320, 321 ITC

A 310-es modellek között a hangerőszabályzó és indukciós tekercs léte a különbség, teljesítményükben majdnem megegyeznek - így közel egyforma hallásvesztésre ajánljuk őket.

Hangerőszabályzó:

Végtelenített kivitelű, forgatható szabályzókerék. A hangerőszabályzó az előre beállított (az ügyfélnek még nem kellemetlen) mértékig engedi a hang erősségét emelni.

Elemtartó ajtó:

Az elem megfelelő polaritással helyezhető bele, kikapcsolóként is üzemel. A kizárólag 312-es méretű cink levegő hallókészülék elemmel üzemeltethető.

Mikrofon nyílás:

A hallókészülékbe ezen a nyíláson keresztül jutnak be a környezet hangjai a készülék "füle". Ha eltömődik, kérjük NE PRÓBÁLJA MEG kitisztítani, mert ez legérzékenyebb része minden hallókészüléknek! Ha a nyílás eltömődik, kérjük keresse fel szervizünket.

Telefon tekercs (a 310-es készüléken nem található meg):

A vezetékes telefonrendszerek és az újabb mobiltelefonok használatához NEM SZÜKSÉGES a "T" üzemmódba állítás, mivel a hallókészülékek mikrofonjai az a (megfelelő távolságban és irányban tartott) telefonkagylóval / mobiltelefonnal működni az esetek 90-95%-ában.


Fülzsírzsűrő filter:

A hallókészülékből a hang a hangszóró csövén keresztül jut a filterbe, majd a filteren keresztül a fülbe. Ez az az alkatrész, mely a fület és a készülék elektronikáját elválasztja egymástól. Többféle kivitelű filterrel készülhet a hallókészülék, melyek szakszerű tisztítását az üzleteinkben, illetve partnereinknél minden esetben megtanítják Önnek.

Kiemelkedően fontos, hogy amikor kiveszi a készüléket a füléből, minden alkalommal tisztítsa meg a filtert - különben idővel az elkoszolódik és nem engedi át a hallókészülék hangját, a készülék nem fog megfelelően szólni.



- Kettős mikrofon technológia a különleges hallási helyzetekben való jobb megértés elősegítésére elérhető kapcsolóval vagy opcionális távirányítóval
- Gyors és egyszerű beállítási folyamat a magányos, felhasználóbarát OASIS plus szoftverrel
- Egy 3 dimenziós megjelenítésű beállítási rendszer
- Kiemelkedően jó a beállítás elfogadottsága a csatornának köszönhetően
- 2 különálló hallási program az ügyfelek igényeinek megfelelően
- In-Situ feedback kezelés
- Személyre szabott beállítási megoldások a Smile Plus felhasználó kezelőszervekkel (helyi szabályozók / teljesen automatikus / opcionális távirányító)
- Digitális - végtelenített kivitelű - hangerőszabályzó (DLC)
- Optimalizált beszédértés a NAL-NL1 állítási módszerrel
- Más jól ismert beállítási módszer is használható
- Kiemelkedően magas immunitás a mobiltelefonok interferenciáival szemben
- Programozható bekapcsolás jelzés és lemerülő figyelmeztetés
- Hatékony fülzsír védelem
- Digitális technológia a kiválóbb hangminőségért és nagyobb komfortért

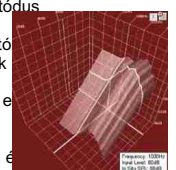

A több évtizedes tapasztalattal folyamatosan

fejlesztett Oasis plus programozó szoftverrel hallásigazgató szakembereink és partnereink könnyedén beállíthatnak minden digitális hallókészüléket.

