



PNEUMAT®

Antidecubitus párna használati útmutató



1. Leírás

A párna egy közös alapra helyezett, egymással összeköttetésben lévő levegővel töltött, rugalmas kamrákból áll, melyek egy speciális gumi keverékből (neoprene) készülnek. A párna villámzárás huzattal van ellátva. A párna levegővel való töltése kézi pumpával történik a párna sarkán (sarkain) elhelyezett szelepen (szelepeken) keresztül. A szelep lehetővé teszi a párna belsejében lévő nyomás pontos szabályozását. Tartozékok: huzat, pumpa, javító készlet, használati útmutató, jótállási jegy.

2. Működési elv

A nagyobb terhelés (nyomás) arra kényszeríti a rugalmas kamrákba töltött levegőt, hogy a kisebb terhelésű kamrákba vándoroljon. Ennek eredményeként a nyugvó helyzetben a párna felülete felveszi a test formáját, és folyamatosan fenntartja a test megfelelő, új helyzetét.

A megfelelő párnafelület lehetővé teszi az ülő személy súlyának egyenletes eloszlását. Ez megelőzi a vérkeringési zavarokat a hosszú idejű ülés által nyomásnak kitett puha szövetekben, lehetővé teszi a szabad véráramlást és testfolyadék eloszlását, és ez által megakadályozza a felfekvési panaszokat.

A kamrák közötti szabad rések és a huzat légáteresztő felső anyaga elősegíti az ülés hatékony szellőzését, hőelvezetését és csökkenti a verejtékezést.

Az anyag, amelyből a párna készült, lehetővé teszi a mosószeres vagy más használatos vegytisztítós mosást.

A huzat rugalmas és csúszós felső része lehetővé teszi a testhelyzet könnyű változtatását. A huzat alsó része csúszásmentes anyagból készül, amely megelőzi a párna nem kívánatos mozgását.

3. Élettartam

A PNEUMAT antidecubitus párna élettartama rendeltetésszerű használat mellett 5 év.

4. Előkészítés a használatra

1. Illessze a pumpa tömlőjét a huzatból kiálló szelep felső részéhez.
2. Nyissa ki a szelepet az óra járásával ellentétes irányba és pumpálja fel a párnát, ameddig a kamrák tele nem lesznek. Ne pumpálja túlzottan keményre!
3. Zárja a szelepet az óra járásával egyező irányba és távolítsa el a pumpa tömlőjét róla.
4. Tegye a párnát egy székre a csúszásgátló felületével lefelé és üljön rá. Tegye a kezét a teste alá a legjobban kiálló csontok mellé.
5. Lassan nyissa ki a szelepet (az óra járásával ellenkező irányban), engedje ki a levegőt, míg a test és a párna alsó felülete között körülbelül 12 mm távolság nem lesz, ez egy ujjnyi vastagság. A levegőnyomás beállítása lehetővé teszi az ülő személy mély besüppedését a párnába. A párnában olyan kevés levegőnek kell lennie amennyi, csak lehet, de a testnek nem szabad érintkeznie a párna alsó részével.
Hasonló módszerrel kell a levegő nyomását beállítani a több kamrás párna minden egyes kamrájánál a test minden egyes része terheléséhez viszonyítva.
Ha a párnán ülve kevésnek bizonyul a levegő, a párnát ajánlatos ismét felfújni és a szabályozási folyamatot megismételni.
6. Minden nap ellenőrizze, hogy megfelelő-e a nyomás és hogy tele van-e mindegyik kamra levegővel!

FIGYELEM:

- **A párna akkor működik helyesen, ha a benne lévő levegő nyomása helyesen van beszabályozva minden egyes személyhez külön-külön, figyelembe véve az adott személy súlyát és betegségének típusát!**
- **A párnát védeni kell a kilyukadástól és mindennemű mechanikai sérüléstől!**
- **Egyes személyeknél a párna anyaga (neoprene) allergiás tüneteket vagy bőrgyulladást okozhat, ezért a párnát, csak a huzattal együtt használja és kerülje a hosszabb idejű bőrrel való közvetlen érintkezést! Mindennemű hasonló panasz esetén forduljon kezelőorvosához!**
- **A párna levegővel való feltöltéséhez a készlethez adott pumpát használja. Ne fújjon belel levegőt szájjal, mert a túlnedvesedhet a párna belseje, ami a párna sérülését okozhatja.**
- **A párna a saját huzatának használatával biztosítja a megfelelő szellőzést és hőelvezetést!**

5. Tisztítás

A párna és huzata tisztítható és mosható.

Amikor a párnát kiveszi a huzatból, kérjük, **ügyeljen a szelep zárva tartására!** Tegye a párnát egy mosó edénybe vagy a fürdőkádba és mosószer, valamint kefe használatával távolítsa el róla a szennyeződések. Öblítse le és közvetlen hőtől védve, hagyja megszáradni szobahőmérsékleten.

Az esetleges rossz szagokat ecetes (10%) víz használatával közömbösíteni tudja. A közömbösítés után öblítse le a párnát tiszta vízzel.

A huzat semleges (klórmentes) mosószer alkalmazásával, kézzel maximum 40 fokos hőmérsékletű vízben mosható, mosás után azonnal öblítse ki és szárítsa meg. Centrifugázni és vasalni Tilos!

6. Javítás

Figyelem: A javító készletben leírt módszer, csak sürgős esetben alkalmazható, amikor a párna azonnali javítást igényel és pótlása lehetetlen. Más esetekben (a jótállás ideje alatt és azon túl is) ajánlott minél hamarabb a párna forgalmazójához visszajuttatni, ahol a szakszerű javítást el tudják végezni, végeztetni.

A javító készletben található ragasztó a szavatossági idején belül használható fel, lejárta után már nem fog megfelelően ragadni. A párnák különleges szerkezete miatt a javítása nem megfelelő berendezéssel ellátott szervizekben nem ajánlatos, mert a párna hibás működéséhez vagy visszafordíthatatlan sérüléséhez vezethet!

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha a terméket társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta

Gyártja:

PNEUMAT Poduszki i materace przeciwoleżynowe MEDARD SENSKI

ul. Karolewska 19/45

85-420 Bydgoszcz, Poland

Tel.+48 52 328 96 26

Fax +48 52 328 96 27

Forgalmazza:

REHAB Zrt. A  csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

info@rehabrt.hu

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a hatályos jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül oly mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetészerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén (az egyéni méretvétel alapján készült eszköz kivételével) azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával, blokkal a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe. A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Eladószerv tölti ki!

A vásárlás napja 20..... hó nap.

(hónap betűvel)

.....
alíírás (P.H.)

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Levágandó jótállási, javítási szelvények

| | |
|--|--|
| <p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hiba megszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> | <p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus: PNEUMAT antidecubitus párna</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p>Eladó:</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> |
| <p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hiba megszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> | <p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus: PNEUMAT antidecubitus párna</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p>Eladó:</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> |
| <p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Hiba megszüntetésének időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>Elhárított hiba leírása:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> | <p>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</p> <p>Típus: PNEUMAT antidecubitus párna</p> <p>Gyártási szám:</p> <p>Kelt: 20..... hó nap.</p> <p>Eladó:</p> <p style="text-align: right;">..... alíírás (P.H.)</p> |