


STOMADRESS® PLUS

Egyrészes urosztómás zacskó
Stomahesive® tapadófelülettel

Használati utasítás

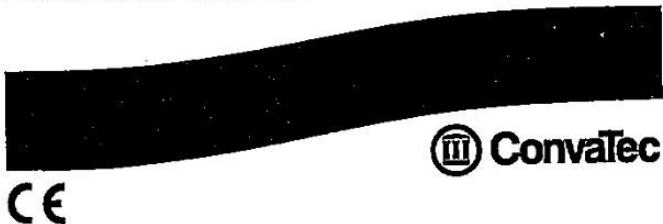

ORKI 905/95

⊗ Egyszeri használatra

⚠ Kérjük olvassa el a használati utasítást.

A sztómán át távozó vialadék kezelésére.

FIGYELEM: Különös figyelemmel kell eljárni ragasztóanyagot tartalmazó eszközökkel a következő esetekben: nem-kontinens urosztóma, főképp, ha megauréterrel társul és hiányzik a vizelet reservoir. Ritkán fordul elő, hogy a betegek vizeletgyűjtő rendszeréből ragasztóanyag mufátható ki. Amennyiben a vizeletgyűjtő rendszerben kimutatható ragasztóanyag jelenléte, mérlegelni kell a ragasztóanyag jelenléte, mérlegelni kell a ragasztós termékek használatát és meg kell kezdeni a megfelelő klinikai kezelést.

FELHELYEZÉS


A sztóma körüli bőrfeületnek mindenféle oldószertől és zsíros anyagtól mentesnek kell lennie.

ELŐRE KIVÁGOTT ZSÁK HASZNÁLATA


Válasszon olyan méretű zsákot, amelynek előre kivágott belső átmérője megegyezik a sztóma legnagyobb átmérőjével. Az előre kivágott nyílást ne nagyobbítsa meg.

AZ EGYEDI MÉRETERE KIVÁGHATÓ NYÍLÁSÚ ZSÁK HASZNÁLATA

A használati utasítást követve rajzolja át a sztóma körvonalát a tapadófelület borítópapírára.

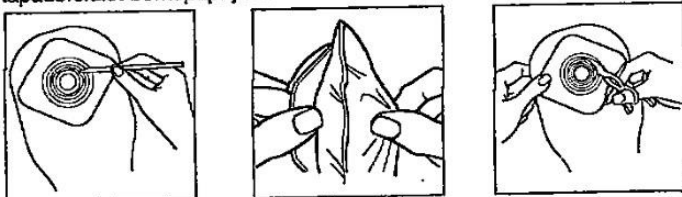


FELHELYEZÉS

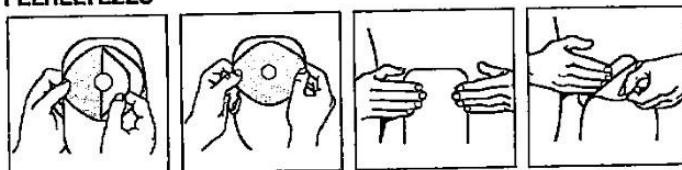


Bizonyosodjon, meg róla, hogy a zsák szorosan illeszkedik a sztóma köré.


ELTÁVOLÍTÁS

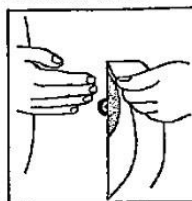

AZ ELFORDÍTHATÓ LEVEZETŐ CSAP HASZNÁLATA AZ UROSZTÓMÁS ZACSKÓK ESETÉBEN

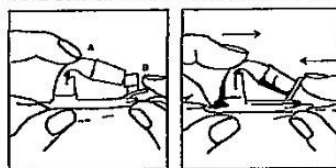

Éjszakai vizeletgyűjtő rendszerhez csatlakoztatható!

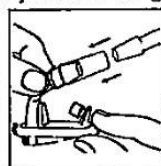


A terméket nem kell eltávolítani fürdés, zuhanyozás vagy úszás idején. Ha a terméket víz éri, törülközővel szárítsa meg.

HULLADÉKKEZELÉS

Tartsa be a helyi hulladékkezelési követelményeket/szabályokat.

TÁROLÁS

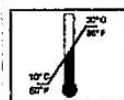

Tárolási hőmérséklet.



Száraz helyen tartsa. Óvja a nedvességtől.

LOT Lot szám

Lejáratú idő

Megjegyzés: Ha irritáció jelentkezik környező bőrfeületen, keresse fel kezelőorvosát.

A ConvaTec termékekkel kapcsolatos részletesebb információért keressen meg bennünket az alábbi címen.

ConvaTec Limited, Deeside CH5 2NU, UK

<http://www.convatec.com>

Forralmazó:

Replant 4 Care Kft.

1119, Bp. Nándorfejérvári út 35.

Ingyenes zöld szám: 06-80-201-201 (titkos kód: 1212)

© 2003 Squibb

© az E.R. Squibb & Sons Inc. és leányvállalatainak bejegyzett védjegye.