

ALVEMA ITO HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Tartalom

BEVEZETŐ.....	3
ELÉRHETŐSÉG	3
BIZTONSÁG	3
KICSOMAGOLÁS.....	4
KI- ÉS ÖSSZEHAJTÁS.....	4
BEÁLLÍTÁSOK	4
KIEGÉSZÍTŐK	5
KEREKEK CSERÉJE.....	6
KÉZIFÉK CSATLAKOZTATÁS	7
KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS.....	7
SZÁLLÍTÁS	7
TECHNIKAI ADATOK.....	8

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy az Eurovema cégtől az ALVEMA ITO terméket választotta.
Az ITO-t sérült gyermekek számára kül- és beltéri használatra fejlesztettük ki.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, illetve valamennyi biztonsági előírást tartson be, hogy teljesüljön az eszköz kényelmes és rendeltetésszerű használata.

ELÉRHETŐSÉG

A termékkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseivel a hivatalos és megbízott alábbi magyarországi forgalmazóhoz forduljon bizalommal:

Medica Humana Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
info@medicahumana.hu, www.medicahumana.hu
T.: 06 1 374 9086

BIZTONSÁG

- Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- FIGYELEM! A toló kart le kell engedni, liftben illetve lépcsőn való használat során. A váz csatlakozóval szemközti fogása esetén a gyermekekre illetve az eszközre jobban tud figyelni, így biztonságosabb (20)
- Ne álljon a lábtartóra, mivel annak funkciója kifejezetten csak az eszközben ülő személy lábának megtartása.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket az eszközben.
- A vázra szerelhető táskák a stabilitásra ellenkező hatással van, és az eszközt feldöntheti.
- Soha ne használja sérülten az eszközt!
- Soha ne javítsa házilag az eszközt!
- Biztonsági okok miatt kizárólag e tevékenység végzésére feljogosított javítóműhelyben, illetve a forgalmazónál lehet az eszközt javíttatni, melynek során kizárólag a gyártótól beszerzett alkatrészeket lehet csak felhasználni, ellenkező esetben a garanciára való jogosultság nem érvényesíthető!
- Az ITO-hoz csatlakoztatott biztonsági öv kizárólag a test rögzítésére használható, nem eszközfékező, visszahúzó szíjként.

KICSOMAGOLÁS

- Vegye ki a dobozból (1)
- Bontsa szét egy mozdulattal (2). Ellenőrizze az összehajtó szerkezetet és kapcsolja össze, ha szükséges
- Állítsa be a tolókart a kívánt dőlésszögbe, a beállító kapszula hátrahúzásával, majd felengedésével(3).
- Helyezze a háttámlához a kitámasztó párnát és rögzítse (4).
- Rögzítse az ülés párnát az ülésre(5).
- Fedje be a medence támasztót a párnázott huzattal (6).
- Rögzítse a biztonsági övet (7)

KI- ÉS ÖSSZEHAJTÁS

- Kihajtáshoz emelje fel a biztonsági emelőt (8) és húzza fel a kapszulát (9).
- Az összehajtáshoz nyomja a háttámlát előre (10). hogy a lehető legjobban össze tudja hajtani az eszközt úgy hogy a háttámla függőleges helyzetben álljon
- Ha háttámla-bővítőt használ, lábtartót is csatlakoztatni kell
- Összehajtáshoz igazítsa a tolókar dőlésszögét a kapszula hátrahúzásával (11).

BEÁLLÍTÁSOK

Lábtartó beállítás

- A lábtartó magasságát csavarkulccsal kell beállítani (12). Lazítsa ki a csavart állítsa be a kívánt magasságot, majd rögzítse vissza a csavart (13).
- A lábtartó hátsó részén található háló mosható és kivehető
húzza ki a szíjat a rudazatból

Szélesség állítása

- Az ülés szélességét az ülés alatt található két csavar lazításával lehet állítani (14). Állítsa be a medence tartót a kívánt pozícióba és szögbe, majd erősítse vissza a csavarokat (15).

Mélység állítása

- Az ülés mélységet a szék alatti rudazaton található két csavar lazításával lehet beállítani (16). Húzza ki az ülést a kívánt hosszúságra, majd erősítse vissza a csavart (17).

Tolókar állítása

- A tolókar igazításhoz húzza maga felé a kapszulát (18). Állítsa be a dőlésszöget, majd engedje el a kapszulát (19).

Figyelem! A tolókart az eszköz emelésekor illetve lépcsőn való használatkor kihajtott állapotban kell tartani!

Ha az eszközt a váz csatlakoztatásnál fogjuk meg, biztonságosabban tudjuk az eszközt mozgatni! (20).

Dőlés állítása

- Az ülés dőlését a rudazat felfelé húzásával tudja állítani (21). Döntse az ülést a kívánt szögbe, majd engedje el a rudazatot (22).

KIEGÉSZÍTŐK

Oldalpelotta - oldalsó testtámasztó

- Rögzítse a lapot a megfelelő csavarokkal a kívánt magasságba (31). Számos megoldás lehetséges: igazítsa be a hátoldali anyagcsavarral.
- Húzza át a pelottát a párna erre kialakított részén, az elasztikus gumiszalaggal a két fémlap között (32).
- Pattintsa össze a pelottát majd nyomja oldalára és engedje fel a kívánt pozícióban. Más magassághoz a pelotta oldalát lehet állítani.

Háttámla magasító

- Helyezze a magasítót az eszköz háttámláján található nyílásba (33).
- Csatlakoztassa az ülés hátsó részén található kapcsológombbal (34).

Abduktor - test csúszásgátló

- Csatlakoztassa a rögzítő eszközt az ülés elejéhez a megadott csavarokkal (38).
- Vágja fel a párnázatot a megjelölt helyek valamelyikén
- Húzza ki a kapcsológombot és igazítsa be az abduktort (39).

Háló - bevásárláshoz

- Cipzározza körbe az eszköz aljához (52).
- A vázhoz szíjazza oda majd patenttal rögzítse (53).

Rögzítő heveder

Mellkas mellény, X-mellény, H-mellény

- A csavarok megfelelő lyukba történő állításával rögzítse a hátlemezt a kívánt magasságba, majd erősítse meg a hátoldalon a csavart (23).
- Vezesse át a pántot a hátlemez nyílásán és feszítse meg a patentot (24).
- Óvatosan vágja ki a hátpárnázatot a kívánt magasságba, majd húzza át a szíjakat a lyukakon
- Erősítse a patentot a hátoldal alsó rudazatához (25).

X-mellény; helyezze a gyermeket az eszközbe és pattintsa be a szorítókapcsot. Igazítsa a pántot húzással (26).

Mellkas-mellény; helyezze a gyermeket az eszközbe és húzza fel a cipzárt, majd a rögzítőt. Állítsa a pántot húzással (27).

H-mellény, helyezze a gyermeket az eszközbe és pattintsa be a szorítókapcsot. Állítsa a pántot húzással (28).

Fejtartó

- Húzza át a párna nyílásán a zsineget és csatlakoztassa az ábrán bemutatottak szerint az ülés hátsó részéhez háttámla magasító nélkül (35), háttámla magasítóval (36).
- A magasságot a fejtartó alatt igazíthatja a zsineg segítségével (37).

Kapaszkodó sín/keresztrúd

- Az első ülésoldali csavarokat lazítsa meg (40).
- A rögzítőt helyezze a nyílásba, majd csavarral erősítse be (41).
- Távolítsa el a műanyag borítást, majd helyezze be a sánt a nyílásba a két patent kattanásiáig (42)
- A kapaszkodót az egyik oldalon is ki lehet emelni, a könnyebb beüléshez (43).

Térdemelő párna

- Csatlakoztassa az ülés VELCRO-hoz a párnát a nagyobb méretet a mozgás irányába kell igazítani. Az üllőpárnát helyezze az emelőpárnára (44).

Gerinc légpárna

- A hátsó párnázathoz, a kívánt magasságba csatlakoztassa a légpárnát (45).
- Húzza ki a pumpát a háttámla és az ülés közé.
- A kényelmes méretig fújja fel (46).

Figyelem ! minimális levegő szükséges a fújáshoz, általában egy , maximum két nyomás elegendő a pumpán!

Saját hátán próbálja ki először a megfelelő méretkiválasztásához!!

Napellenző

- Nyissa meg 2 cm-re a cipzárat, úgy hogy ennek a tartozéknak a behelyezéséhez elérje a hátsó rudazaton a nyílást.
- Helyezze a napvédőt az ülés háttámla rudazatán található két nyílásba, vagy a magasító részbe(47).
- Csatlakoztassa a kapcsot az ülés hátulján található felső csatlakozóhoz, ha a magasítót használja, egyébként használja a második csatlakozó kapcsot (48).

Nap- és esővédő

- Húzza át a borítót a markolatnál.
- Borítsa be a napvédő első részét
- Pántozza rá a vázra majd rögzítse patenttal (49).

Lábszív

- Rögzítse a lábat lábszíjjal a lábtartóhoz. Csatlakoztassa a zárórész a lábon keresztül és igazítsa a hosszúságot, míg a láb megfelelően rögzítésre nem kerül.

A szíjat a lábon X illetve párhuzamosan lehet felhelyezni. (50).

Szélfogó

- A szélvédőt mind a gyermek jelenlétében mind anélkül csatlakoztatni lehet az eszközhöz.
- Tegye a lábtartót a zsákba (54).
- Patenttal rögzítse az üléshez (55).
- Igazítsa zsinórral a tetején.

Thermo zsák - melegítő zsák

- Csatlakoztassa a laza VELCRO-hoz , az ülés alján a csőhöz (56).
- Helyezze a zsákot az ülésre majd az első szíjat csatlakoztassa a VELCRO-hoz az ülés alatt
- Az egész előoldal lecipzározható.
- A zsinórzatot a tetején igazítsa.

KEREKEK CSERÉJE

Bolygókerékről váltás rögzített kerékre

- Lazítsa meg a csavart a tengelyen és távolítsa el a bolygókerékeket (60).
- Erős mozdulattal lazítsa meg a csavart a villa alatt.
- Lazítsa meg a csavart a vázon és távolítsa el a villát(61).

- Tegye helyére a rögzített kereket majd csavarral szorítsa a vázhoz (62).
- Szorítsa meg a csavart a középrudazaton.

Rögzített kerékről váltás bolygókerékre

- Lazítsa meg a csavarokat a középrudazaton majd a vázon (63). Távolítsa el a kereket.
- Tegye helyére a villát, majd a csavarral erősítse a vázra. (62).
- Egy erős mozdulattal szorítsa meg a csavart a villa alatt (61).
- Helyezze fel a bolygókeréket majd a tengelyen csavarral erősítse meg a csavarral (60).

KÉZIFÉK CSATLAKOZTATÁS

- Eszközzel távolítsa el a kapszulát (64).
- Eszközzel távolítsa el a kereket (65).
- Helyezze a féket a kerékvázra és a csavarral csatlakoztassa a vázhoz (66).
- Szerelje újra fel a kereket.
- Tegye a huzalt a hátpárna mögé (67) majd csatlakoztassa a párnát a patenttal (68).
- Csatlakoztassa a fék-kart az eszköz toló fogantyújához (69). A csavarral erősítse meg.

KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS

A párna 40°C fokon mosható, centrifugálható és szárítható.

Ne használjon lágyítót vagy fehérítőt. Mosás után vasalható.

Ne „szárasztisztítson”!

Száraz, napfénytől védett helyen tárolja az eszközt.

A vázat ronggyal, autó samponnal kell tisztítani.

Évente kétszer szakemberrel kell ellenőriztetni az eszközt. A Forgalmazóval hiba esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot.

SZÁLLÍTÁS

A gyermek és/vagy az eszköz szállítás közbeni sérülésének elkerülése céljából feltétlenül tartsa be az alábbiakat

AZ ITO megfelel az ANSI/RESNA WC/1-19 fejezet szabvány követelményeinek

Az ITO az alábbi méretű személy szállítására alkalmas:

Small (kicsi) ITO – maximális magasság = 47” (120cm)

Maximális súly = 55 lbs. (25kg)

TECHNIKAI ADATOK

	Small illetve Large kivitel szerint:
Ülés szélesség	26 cm illetve 33 cm
Ülés mélység	28 cm illetve 33,5 cm
Gyermek magassága	120cm illetve 135 cm
Lábtartó magasság	14-28 cm illetve 20-36 cm
Terhelhetőség	25 kg illetve 40 kg
Hátmagasság	50 / 62 cm illetve 58 / 72 cm
Teljes szélesség	58,5 cm illetve 64,5 cm
Összehajtott méret	79,5x58,5x37 cm illetve 84x64,5x37 cm
Súly	12 kg illetve 13 kg
Hátsó kerék - átmérő	24 cm illetve 24 cm
Első kerék - átmérő	17,5 cm illetve 17,5 cm

Anyag:

A gyártás során kizárólag nem toxikus festékanyagok, porszórtan kerülnek felhasználásra

A nem gyúlékony kárpit az ISO EN1021-1 és 1021-2 szabványkövetelményei szerint készült.

Acél és alumíniumcsövek felhasználásával készült

A párnarészek moshatóak, tisztításuk egyszerű.

Az alapanyag bio-kompatibilitás szempontjából az ISO 10993-5 szabványkövetelményeinek felel meg.

Teszt:

Az ITO az ANSI / RESNA WC / I. fejezet és ISO/FDIS 7176 szabványkövetelmények alapján

került töréstesztelésre és elfogadásra valamint a TÜV a DIN EN 12182 és EN 1888

szabvány követelményei szerint fogadta el.