


RESPIRONICS®
ComfortSelect™

Használati útmutató

A Comfort Select maszk a felnőtt betegek (>30 kg) Respironics CPAP illetve bi-level készülékekkel történő kezelése során a készülékhez való csatlakozást biztosítja. A maszkon kilégzőnyílás található, amely biztosítja a pácienskörben lévő levegő folyamatos cserélődését. **A maszkhoz nem szükséges kilégzőadaptert csatlakoztatni!**
LATEX-MENTES

FIGYELEM!

A maszk csak szakorvos javaslatára használható!


A maszk csak bekapcsolt állapotban lévő, és jól működő CPAP, illetve bi-level készülékhez csatlakoztatva használható. A maszk rendelkezik beépített kilégzőnyílással, amely folyamatos légáramlást tart fenn a pácienskörben. A kilégzőnyílást eltakarni vagy eltömíteni nem szabad!

A legtöbb CPAP rendszernél előfordulhat a már kifújt levegő egy részének újbóli belégzése. A CPAP rendszereket kilégzőnyílással ellátott maszkkal, vagy ezzel nem rendelkező, de kilégzőadapterrel összekapcsolt maszkkal kell használni. Ha a CPAP készülék be van kapcsolva, a légáramlás a levegőnyílásokon keresztül eltávolítja a kilélegzett levegőt. Ha a CPAP készülék nem működik, a kifújt levegő egy része újra belégzésre kerülhet. Az elhasznált levegő újbóli belégzésének elkerülése érdekében a maszkot csak működő CPAP készülékhez kapcsolva használja!

A maszkon található egy zárókupakkal ellátott nyílás, amelyhez nyomásmérő eszköz kapcsolható. Ha nem kapcsolódik rá nyomásmérő, a nyílást a kupakkal le kell zárni.

Ha a maszk használatától bőre kipirosodik, forduljon orvosához.

A maszk részei

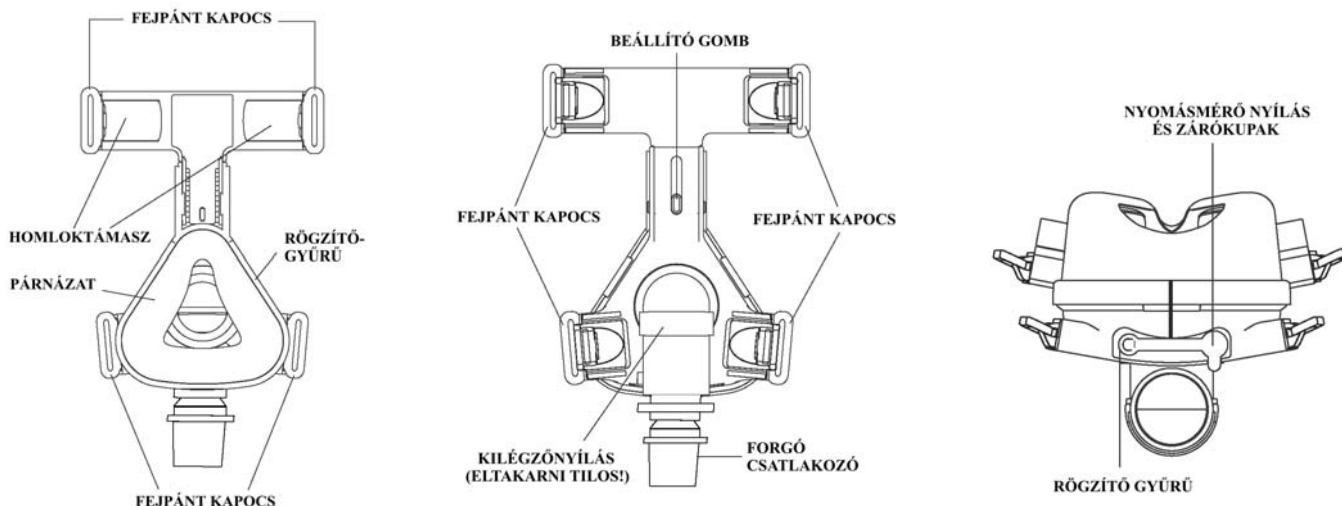

Mielőtt megkezdi a maszk használatát, tisztítsa meg a maszkot és a homloktámaszt az alábbi tisztítási útmutatásnak megfelelően!

Tisztítás

A maszkot és a fejpántot csak egy személy használhatja. A maszkot, alkatrészeit és a homloktámaszt naponta tisztítsa. A fejpántot hetente legalább egyszer mossa ki. Mosás előtt a fejpántot vegye le a maszkról. Levétel után a tépőzárakat érdemes visszazárni, így mosás közben nem akadnak be a ruhákba.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG ŐRIZZE MEG!

A maszk tisztítása




1. A maszk és alkotórészei tisztítása kézzel, langyos vízben történhet, ügyelve arra, hogy azok ne sérüljenek. A tisztításhoz használjon enyhe hatóanyagú sampont vagy mosogatószeret. Ne használjon balzsamot vagy hidratálót tartalmazó tisztítószeret, illetve fehérítőt. A maszk nem tisztítható alkohollal, alkoholtartalmú oldattal, illetve erős háztartási tisztítószerekkel. Ne fertőtlenítsen a maszkot! **A maszk mosogatógépben nem mosható!**
2. Öblítse le a maszkot, majd levegőn szárítsa meg. A használat előtt győződjön meg arról, hogy a maszk megszáradt.
3. Tisztítás után mindig ellenőrizze a maszk sértetlenségét. Cserélje ki a maszkot, ha bármely alkatrésze sérült.

A fejpánt és a gyorskapcsok tisztítása


A fejpántot legalább hetente egyszer tisztítsa. A fejpánt a rajta lévő kapcsokkal együtt, kézzel vagy mosógépben mosható, hagyományos mosószerrel. Fehérítőt ne használjon. Mosás után alaposan öblítse át, majd terítse ki száradni, vagy szárítsa meg gépben, közepes hőfokon. A fejpántot ne vasalja. Megjegyzés: Mosás után a fejpánt beállításának kisebb módosítása szükségessé válhat.

A maszk felhelyezése

1. A maszkot az arcon megtartó fejpántrendszer két felső és két alsó pántból áll. A pántokon egy-egy gyorskapcsot talál, amelyek megkönnyítik a maszk mindennapos fel- és levételét, mivel a pántok beállítása után a tépőzárakat már nem kell minden fel- és levételnél használni, elég a kapcsokat kioldani. A maszk felhelyezésénél először a felső pántokon lévő kapcsokat rögzítse a homloktámaszon található rögzítési pontokon.
2. Az egyik alsó pánton lévő kapcsot rögzítse a maszk oldalán található kapcsolódási ponthoz.
3. Egyik kezével fogja meg a maszkot és nyomja enyhén az arcához. A másik kezével feszítse meg kissé a fejpántot, majd helyezze fel a fejére.
4. A másik alsó pánton lévő kapcsot is rögzítse a maszk oldalához, majd csatlakoztassa a gégecsövet a maszk forgó csatlakozójához.
5. Kapcsolja be a CPAP vagy bi-level készüléket. Feküdjön le, és lélegezzen normálisan az orrán keresztül, zárt szájjal.

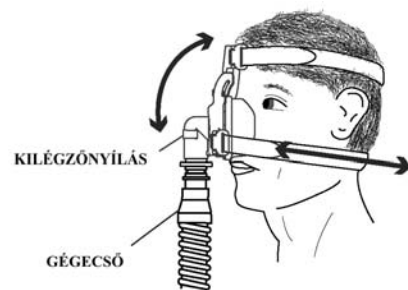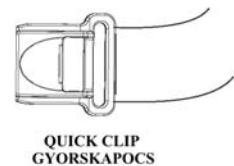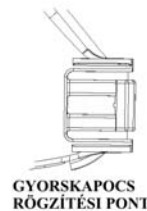

6. Állítsa a homloktámaszt a megfelelő távolságra. Ehhez nyomja meg a maszk felső nyúlványán található gombot, majd csúsztassa a homloktámaszt tartó műanyag elemet felfelé vagy lefelé, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A beállítás célja, hogy a levegőszivárgás minimális legyen, és a maszk kényelmesen feküdjön az arcán.

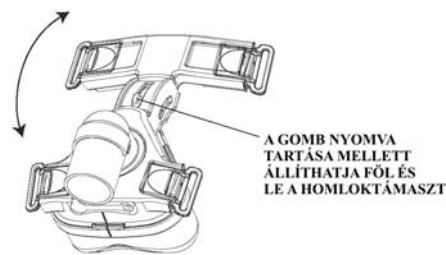


7. Állítsa be a tépőzárakat úgy, hogy a szivárgás minimális legyen, és a maszk kényelmesen feküdjön az arcán.

MEGJEGYZÉS: A fejpánt minden pántján két tépőzár található. Nagyobb fejméret esetén használja a fekete, kisebb fejméret esetén a kék tépőzárát a fejpánt rögzítéséhez. A fölösleges tépőzárakat ollóval levághatja. A fejpántot túlfeszíteni nem szabad, mert szivárgást okozhat, vagy növelheti azt.



A maszk levétele

A gyorskapcsok kioldásával egyszerűen és kényelmesen veheti le a maszkot. A kapocs kioldásához nyomja meg az átlátszó műanyag elemet, és óvatosan húzza a kapcsot kifelé.

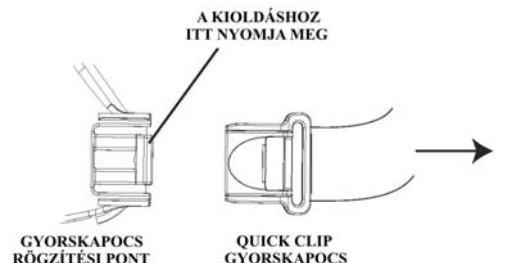


A maszk alkatrészeinek cseréje

A maszk egyes részei szükség esetén cserélhetők. Az elemek cseréje érdekében lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával. Amennyiben az elhasználódott rész cseréjét saját kezűleg végzi el, kövesse az itt leírtakat, és ügyeljen arra, hogy a művelet alatt a maszk ne sérüljön.

A maszk párnázatának cseréje

A párnázat cseréjéhez először a párnázatot rögzítő gyűrűt kell eltávolítani. A rögzítő gyűrű három kis karommal kapcsolódik a maszkhoz (a maszk két oldalán illetve az alján), ezeket enyhén emelje meg, majd a gyűrűt a maszkról óvatosan húzza le. Ezek után a párnázatot távolítsa el a maszkról.

A gyűrűt ezután illessze az új párnázatra, ügyelve arra, hogy a gyűrű karmai a párnázat orral érintkező részétől távolodó irányba (a maszk felé) nézzenek. A párnázatot ezután illessze a maszkra. Az illesztés akkor megfelelő, ha a párnázat maszkkal érintkező élében végigfutó vájatba a maszk széle mindenhol belesimul. Ha az illeszkedés megfelelő, akassza vissza a rögzítő gyűrű karmait a maszk oldalán és alján lévő rögzítési pontokba.

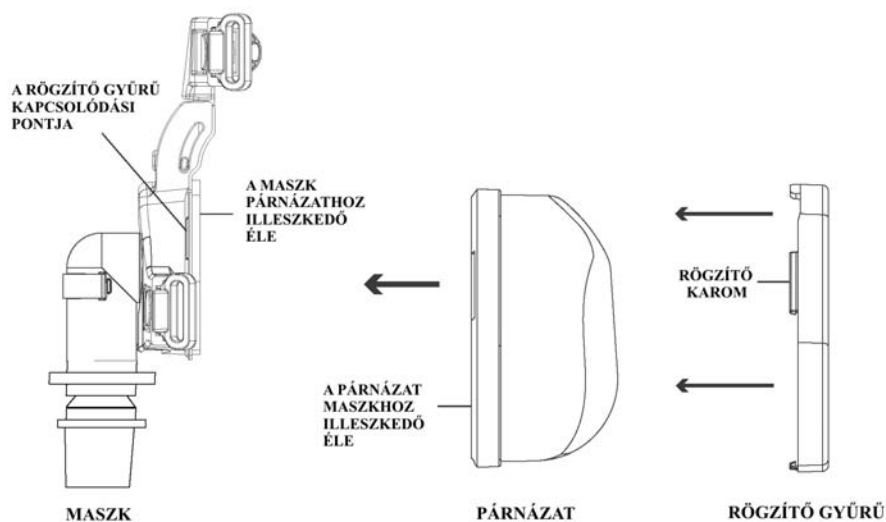

MEGJEGYZÉS: A művelet végén ellenőrizze, hogy a maszk, a párnázat és a rögzítő gyűrű alján lévő kék vonalak egy vonalba essenek.

A homloktámasz cseréje

Távolítsa el a maszkról a régi homloktámaszokat. Ehhez fogja meg az egyik homloktámaszt, és kissé csúsztassa el a fejpánt felé, majd óvatosan húzza meg maga felé. Ekkor homloktámasz fejpánttól távolabbi része kiszabadul az azt rögzítő horonyból. Most húzza meg a homloktámaszt a fejpánttól távolodó irányba, és távolítsa el azt a maszkról. A másik homloktámasszal is végezze el ezt a műveletet.

Az új homloktámasz alsó, a horonyba illeszkedő részét csúsztassa be a horonyba a fejpánt felé mutató irányba, amíg az meg nem akad. A homloktámasz másik végét nyomja be a horony szabad végébe, majd kissé csúsztassa el a homloktámaszt a fejpánttól távolodó irányba, hogy az biztosan a helyére kerüljön.


A zárókupak cseréje

Először távolítsa el a zárókupakot a nyomásmérő nyílásról, majd húzza le a kupak rögzítő gyűrűjét a maszkról. Az új zárókupak rögzítő gyűrűjét illesse a helyére, majd zárja le a nyílást az új zárókupakkal, amennyiben a nyíláshoz nem kapcsol nyomásmérő műszert.

MEGJEGYZÉS: Ha a maszkot fejfelé tartja úgy, hogy a párnázat maga felé néz, a zárókupak a bal oldalon, a rögzítőgyűrű a jobb oldalon helyezkedik el.

A gyorskapcsok cseréje

A gyorskapcsot a fejpánton lévő tépőzár kioldása után a pántról lehúzhatja. Az új kapcsot fűzze be a fejpántba, majd rögzítse a tépőzárral a kívánt helyzetben.

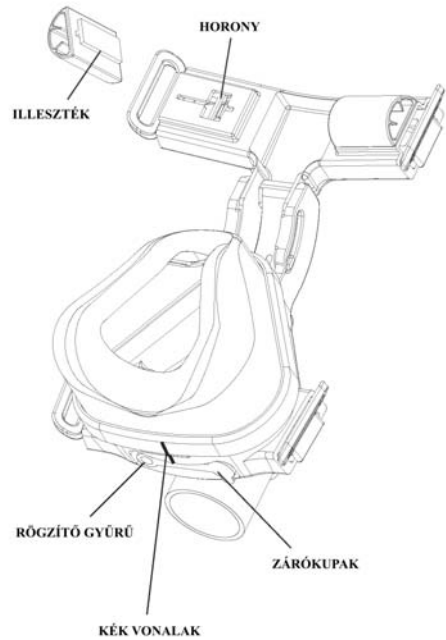

Hasznos tudnivalók

- Minden használat előtt tisztítsa meg a maszkot, és mossa meg az arcát.
- Győződjön meg róla, hogy a maszk Önnek megfelelő méretű.
- Ne feszítse meg túlzottan a fejpántot! A túl szoros fejpánt levegőszivárgást illetve bőrirritációt okozhat és károsíthatja a maszk párnázatát.
- Cserélje ki a maszk párnázatát és a homloktámaszt, ha az megkeményedett, vagy eldeformálódott.

Gyártja:

RESPIRONICS INC.®

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania
15668-8550 USA

A **RESPIRONICS®** termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:



WALLITRADE Kft.

1134 Budapest, Váci út 43. Telefon: (06-1) 451-4964, Fax: (06-1) 451-4951

* Az eredeti szöveg azonosító száma: 1007939 JR 1/30/02

HEÜ01