



ANITA-HUNGARIA KFT.
1123. Budapest,
Kék Golyó u.22.

Tel: (36-1) 487-1030

Fax: (36-1) 487-1033

e-mail: anita.h@anita.net

www.anita.com

Használati útmutató ó szilikonos mellprotézis kezelése

A szilikon mellprotézis, pótolja az emlő részleges vagy teljes eltávolítása következtében kialakuló szöveti hiányt, visszaadja az optikailag ideális külső megjelenést és helyreállítja a test anatómiai egyensúlyát.

Tökéletesen illeszkedik a mellkasfalra, lágyan követi a mellei heg vonalát, anélkül, hogy nyomást gyakorolna az érzékeny hegvonalra. Súlyban, konzisztenciában, mozgásban tökéletesen hasonlít az ép mellhez. Viseléskor átveszi a testhőmérsékletet, így tapintáskor is ugyanolyan melegérzetet ad, mint a természetes mell. A mellprotéziseket igen finom tapintású a bőrhez hasonló küllemű természetes alapanyagból készült fólia borítja. A fólia tökéletesen bírja a súrlást, ezért a protézis közvetlenül a testen is viselhető, dermatológiai elváltozásokat nem okoz.

A protézist viseléskor a speciális protézistartó melltartó mellkosaraiba bevarrt -a protézisek számára kialakított - zsebbe kell behelyezni.

A szilikon mellprotézis ápolása:

Szilikon mellprotézisét naponta kézi mosással, enyhén szappanos vízzel mossa le, majd puha törölközővel törölje szárazra.

A klóros, vagy sós víz nem károsítja mellprotézisét, azonban az agresszív tisztító- és oldószerek, a hegyes, vagy éles tárgyak, erősségű hatás károsíthatják a protézist.

Ha a fólia megsérül javítása nem lehetséges.

Ezért használaton kívül ajánlott saját dobozában tárolni.

100% szilikon