


# Alterna®

# Coloplast

Urosztóma zacskó  
Egyrészes

## Alkalmazási és eltávolítási útmutató

### Előkészítés

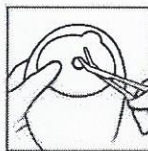

Ívelt végű kis olló és méretvételi sablon használatával készítsen a tapadó felszínen a sztóma pontos méretének és alakjának megfelelő nyílást. A sztóma méretének és formájának méréséhez használhatja a mellékelt sztóma mérőszablon. A szivárgás és a bőrproblémák kockázatának csökkentése érdekében fontos, hogy az öntapadó felszínen a nyílás pontosan illeszkedjen a sztóma köré.




Alaposan tisztítsa meg a sztómát és a környező bőrfelületet. A tapadó felszín felragasztása előtt a bőrnek teljesen száraznak kell lennie.

### Alkalmazás




Húzza le a védőfilmet az öntapadó felületről.

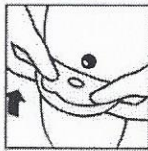

Hajtsa vissza az öntapadó felszínt, illessze a sztóma köré, és nyomja rá határozottan a bőrre.



Gyakoroljon nyomást a zacskóra, hogy a tapadás erős legyen és az öntapadó felszín tökéletesen illeszkedjen a sztóma körüli bőrre. Ne felejtse lezárni a kimenetet használat előtt.

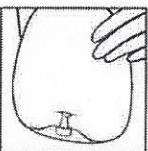

A kényelem és a diszkréció érdekében a kimenetet el lehet rejtetni az elől lévő zsebben.



Coloplast A/S  
Høitveddam 1  
3050 Humlabæk  
Denmark

### Használati utasítás

23317621 Version 1

A Coloplast logó a Coloplast A/S bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. ©  
2015-12-03

### Javallatok

A sztómazacskó a sztómán kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az öntapadó felszín a zacskó rögzítésére, és a sztóma körüli ép bőrhez való ragasztásra szolgál.

### Tudnivalók

A terméket vízszintes helyzetben, hűvös és száraz körülmények között tárolja - ne fagyassza.

Alkalmazás előtt várjon, amíg a termék felveszi a szobahőmérsékletet.

A Coloplast semmiféle felelősséget nem vállal az olyan sérülésekért vagy károkért, amelyek a terméknek a Coloplast jelen ajánlásainak meg nem felelő használatából adódnak.

### Figyelmeztetés

Mielőtt konvex terméket használ, forduljon egészségügyi szakemberhez.

### Vigyázat

Az egyszer használatos termék ismételt használata potenciálisan veszélyes lehet a felhasználóra. Az újrafeldolgozás, a mosás, a fertőtlenítés és/vagy a sterilizálás nyomán a termék jellemzői megváltozhatnak, ami növeli a fizikai sérülés és a fertőzés kockázatát a felhasználó számára.

### Kiürítés/Leeresztés



Tartsa a kimenet dugóját/végét felfelé, szorítsa el a kimenet külső végét, húzza ki a dugót, engedje fel a kimenet szorítását, majd ürítse ki a zacskót. A teljes kiürítés után gondoskodjon arról, hogy a kimenet szorosan le legyen zárva a teljesen betöltött dugóval.

### Eltávolítás




Az öntapadó felszínen lévő fűl felemelésével óvatosan húzza el a zacskót a hasról, és lassan gördítse le a tapadó felületet.

Az eltávolítást segítő, szabad kezével alkalmazzon a bőrén kis nyomást.

A termék kizárólag egyszeri használatra szolgál, és a közönséges háztartási hulladékkal együtt, vagy a helyi irányelveknek megfelelően helyezendő a hulladékba.

Ne húzza le a vécén a terméket.

### Éjszakai vizeletgyűjtőzsák

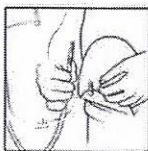

Azt javasoljuk, hogy a nagyobb biztonság érdekében használjon Coloplast éjszakai vizeletgyűjtő zsákot, amelyet speciálisan arra terveztek, hogy közvetlenül csatlakozzon a Coloplast urosztóma zacskóhoz. A Coloplast urosztóma zacskók azonban mindenféle típusú éjszakai vizeletgyűjtő zsákhoz is csatlakoztathatók a mellékelt csatlakozó segítségével.

A keskeny végét be kell tolni a Coloplast urosztóma zacskó kimenetébe, a másik végét pedig az éjszakai vizeletgyűjtő zsákhoz kell csatlakoztatni.