


Előkészítés

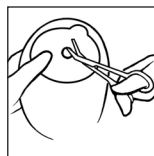

Ívelt végű kis olló és méretvételi sablon használatával készítsen a tapadó felszínen a sztóma pontos méretének és alakjának megfelelő nyílást.

A sztóma méretének és formájának méréséhez használhatja a mellékelt sztóma mérőszablont.

A szivárgás és a bőrproblémák kockázatának csökkentése érdekében fontos, hogy az öntapadó felszínen a nyílás pontosan illeszkedjen a sztóma köré.




Alaposan tisztítsa meg a sztómát és a környező bőrfelületet. A tapadó felszín felragasztása előtt a bőrnek teljesen száraznak kell lennie.

Felhelyezés



Húzza le a védőfilmet az öntapadó felületről.

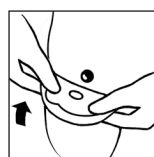

Hajtsa vissza az öntapadó felszín, illessze a sztóma köré, és nyomja rá határozottan a bőrre.



Gyakoroljon nyomást a zacskóra, hogy a tapadás erős legyen és az öntapadó felszín tökéletesen illeszkedjen a sztóma körüli bőrre.

Eltávolítás




Az öntapadó felszínen lévő fül felemelésével óvatosan húzza el a zacskót a hasról, és lassan gördítse le a tapadó felületet.

Az eltávolítást segítő, szabad kezével alkalmazzon a bőrén kis nyomást.

A termék egyszerűhasználatos és normál háztartási hulladékként kezelendő. Ne dobja a zacskót a WC-be.

Szagszűrő címke

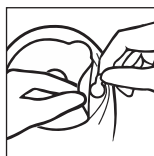

Szükség esetén helyezze fel az egyik mellékelt szagszűrő címkét a szagszűrőre, hogy a gázok ne jussanak ki.



Használati útmutató

23315973 Version 1

Coloplast logó Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. © (2014-06-20)

Javallat

A sztómazacskó a sztómán kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az öntapadó felszín a zacskó rögzítésére, és a sztóma körüli ép bőrhez való ragasztásra szolgál.

Információ

A terméket vízszintes helyzetben, hűvös és száraz körülmények között tárolja - ne fagyassza.

Alkalmazás előtt várjon, amíg a termék felveszi a szobahőmérsékletet. Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

Vigyázat

Mielőtt konvex terméket használ, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Figyelmeztetés

Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy fertőzés fokozott kockázatával jár.