

ABC protézistartó melltartók használati utasítása

A fehérneműt kézzel, kéz meleg vízben javasoljuk mosni. Amennyiben gépben mossa, feltétlenül használjon mosózsákot a forma megtartása és az anyag minőségének megőrzése érdekében.

A mosáshoz finom mosószert kell használni, a melltartóba varrt címkén feltüntetett jelzések szerint járjon el, miszerint

szárítógépben szárítani tilos
vasalni tilos
vegyileg tisztítani tilos
fehérítőszer használata tilos
kézzel mosható max 40-es fokos vízben

Bizonyos fehérnemű (pl kompressziós melltartó) alkalmas a magasabb, 90 fokos mosásra, amely műtét után, vagy a seb gyógyulási folyamata alatt javallt, erről – ahogyan az anyagösszetételről, és a fenti használati utasításokról - a bevarrt címke tájékoztat a nemzetközi előírások szerint.

Fontos, hogy a fehérneműt alaposan öblítse ki, mert a mosószer maradványok érzékeny bőrűeknél bőrirritációt okozhatnak, illetve az anyag elszíneződését, elsárgulását okozhatják. Makacs szennyeződést okozhatnak továbbá a parfümök, dezodorok, ezeket a fehérnemű felvétele előtt kell a testre permetezni, és meg kell várni, míg a bőr megszárad.

Protézistartó melltartók speciális használata:

- a protézist a melltartó hátsó részének rugalmas nyílásán át helyezze be úgy, hogy a protézist kicsit hajtsa össze, majd a kosárban igazítsa el
- a használat során a vállpántokat érdemes után állítani, csakúgy, mint a hátpántot, hogy mindig pontos és biztonságos tartást nyújtson a melltartó
- a melltartó sehol ne vágjon be, mert az elősegíti a limfödéma kialakulását, ennek figyelembevételével válasszon a modellek és a méretek közül
- a melltartó méretet időnként ellenőrizni kell, tekintettel az esetleges hízás/fogyás vagy más hatásokra

Forgalomba hozó:

NEC-Női Egészség Centrum Kft
2151 Fót Czuczor u. 22.
Szaküzlet: 1042 Budapest József Attila u. 79/81
www.noiegeszsegcentrum.hu
Tanácsadó vonal: 06 70 384 4141