

ABC Shaper szilikonos mellprotézis

Használati utasítás

A külső mellprotézisek célja, hogy a mellműtött nők megjelenését és egyensúlyát helyreállítsa, ezért kérjük, tartsa be az alábbi tanácsokat, hogy az ABC mellformája sokáig szolgálja az Ön elégedettségét és mindennapjainak kényelmét:

Tisztítsa meg mindennap langyos szappanos vízzel, öblítse le, és egy puha törülközővel törölje szárazra. A klóros vagy sós víz nem árt az ABC szilikonos mellprotéziseknek.

Tárolja a mellprotézist az eredeti dobozában és az eredeti tárolási formájában.

Vigyázzon az éles, hegyes tárgyakkal! Semmiféleképp ne kerüljön a mellprotézis közelébe tű, törött köröm, macskakarom vagy olló, mert a fólián keletkezett sérülés nem javítható.

Kerülje a mellprotézis erős dörzsölését, csavarását vagy hirtelen megrántását.

Ne használjon a mellprotézis felületén közvetlenül parfümöt, forró tárgyat vagy forró vizet!

Ne használja az ABC külső szilikonos mellprotézist a seb teljes gyógyulásáig.

Az ABC Shaper mellprotéziseket a protézistartó melltartó hátsó zsebébe csúsztatva kell viselni. A személyes próba során a megfelelő méret és forma kiválasztásában, és a viselés részleteinek bemutatásában szaktanácsadók segítenek a gyógyászati szaküzletekben. Fontos, hogy a melltartó és a mellprotézis az Ön alkatának, műtéti sajátosságainak megfelelő típusú és méretű legyen!

Garancia

Az Ön mellformájára kétéves gyártói garancia vonatkozik. Amennyiben úgy véli, hogy bármi gyártásból eredő hibája van a protézisének, amely korlátozza a használatot, úgy forduljon közvetlenül a forgalmazójához. Amennyiben valóban gyártásból eredő hibáról van szó, úgy az ABC kicseréli a protézisét.

Technikai adatok

Az ABC szilikonos mellprotézisek teljes minőségellenőrzésen esnek át. A használat során keletkező esetleges elszíneződés nem befolyásolja a termék funkcióját és minőségét.

Minden szilikon mellforma polyuretán filmréteggel borított szilikongél, amelynek alapanyaga polydemthylsiloxane és színezőanyag. Továbbá a következő típusok könnyített üreges microrészecskéket tartalmaznak: Lightweight, Flowable Back, Dual-Soft, Massage-Form® kollekción, ABC Diamond kollekción és az ABC Myform™ kollekción.

Az **ABC Shaper mellprotézisek** indikációja: részleges/ emlőmegtartó műtétek után a műtéti heg teljes gyógyulását, valamint a sugárterápiás kezelés befejezését követően a szövethiány pótlására, a műtéti és alkati adottságoknak megfelelő ellátásra.

Az ABC szilikonos mellprotézisek külső használatra készültek, nincs felhasználási kockázatuk vagy mellékhatásuk a normál használat mellett.

Magyarországi forgalmazó és tanácsadóközpont: Női Egészség Centrum Kft Szaküzlet 1042 Budapest József Attila u. 79/81. Tanácsadóvonal: 70 384 4141 Weboldal: www.noiegeszsegcentrum.hu email: info@noiegeszsegcentrum.hu