

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MULL –LAPOK STERIL, 100 LAPOS 10 X 10 CM-ig

Bella-Hungária 10x10 cm, vágott

ISO kód: **02 24 03 03 06 004**

A termék alkalmazása

1. A kötszer felhelyezése előtt tisztítsa meg a sebet, szárítsa meg a seb körüli bőrfelületet.
2. Válassza ki a megfelelő méretű kötszert, mely a seb teljes felületét 2-3 cm ráhagyással lefedi.
3. Válassza szét a védőpapírt a fóliától.
4. Megfelelő mennyiségű lapot helyezzen a sebre.
5. A felhelyezés után rögzítse kötözőpólyával vagy tapasszal.
6. Szükség esetén cserélje.
7. A kötszert azonnal el kell távolítani, ha a fertőzés bármely klinikai tünete jelentkezne.

Egyszerhasználatos termék, a csomagolás sérülése vagy előzetes felbontás esetén a sterilitás nem garantálható.