




Filmbevonatú, ragasztós, nedvszívó steril kötözőszer.

- Minden fázisban alkalmazható kötszer
- Védi a sebet felszívja a váladékot
- Fenntartja a nedves sebkörnyezetet

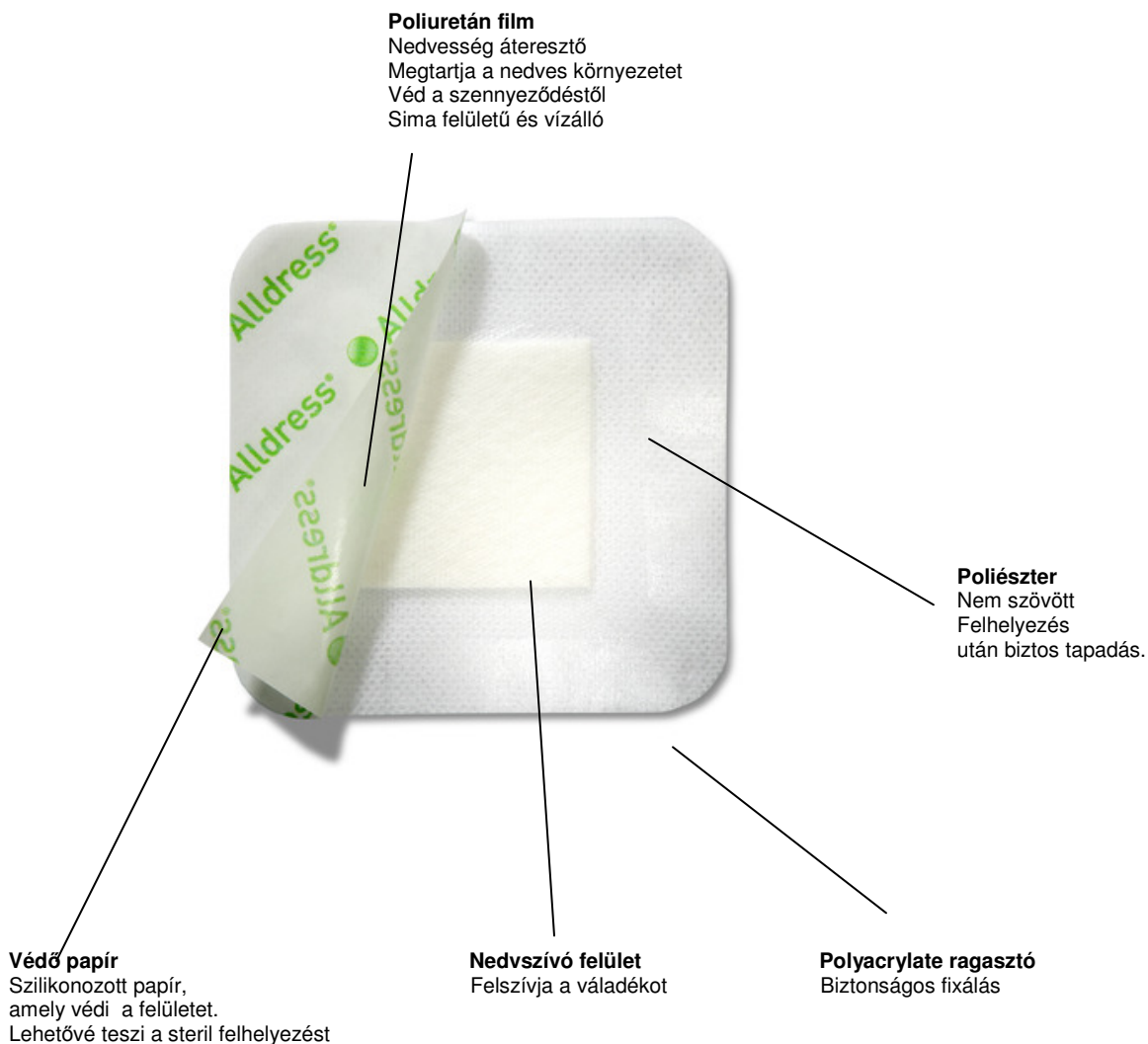

Alkalmazási terület:

Az Alldress a nyílt krónikus sebek kezelésére alkalmas, mint például decubitus, fekélyek, lábszárfekély, krónikus sipoly, stoma, tracheostoma, stb.



Nyissa ki a csomagot. Vegye ki a kötszert.
Távolítsa el a fedő papírt.



Bizonyosodjon meg róla, hogy a sebet körülvevő bőr száraz. Helyezze a kötszert a sebre. Határozottan simítsa rá a ragasztós széleket a bőrre.

Figyelmeztetés:

Az Alldress nem használható olyan betegeknél, akik érzékenyek az akrilát ragasztókra, illetve akiknek nagyon gyenge, könnyen sérülékeny bőrük van.
Olyankor alkalmazza a Mölnlycke Health Care "Safetac" kötszereit: Mepilex, Mepilex Border, stb.

Nagyság	Sebpárna nagyság	Rendelési szám	Tartalma Kartonban	Tartalma Dobozban
10 x 10 cm	5 x 5 cm	265320	100	10
15 x 15 cm	10 x 10 cm	265340	100	10
15 x 20 cm	10 x 15 cm			
		265360	100	10

