

CE  
0086

 **STERILE**

# CombiDERM®

## Nedvszívó kötszer




 **ConvaTec**

 - Egyszerhasználatos

**STERILE** - Gamma sugárral sterilizálva

 - Olvassa el a használati utasítást

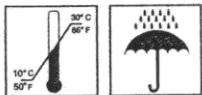

- Szobahőmérsékleten tárolandó; hidegtől és magas páratartalomtól óvjuk

**LOT** - Lot szám

 - Lejáratási idő

### TERMÉK LEÍRÁS

A CombiDERM kötszer egy steril kötszer, hidrokolloid tapadófelülettel és központi nedvszívó párnával. A párna magába szívja a sebváladékot és kíméli a szöveteket.

A CombiDERM kötszert lehet önmagában vagy más elsődleges kötszerrel együtt használni a sebváladék kezelésére.

### JAVALLAT

1. Krónikus váladékozó sebek, mint felfekvések, lábszárfekélyek, diabéteszes fekélyek.
2. Akut váladékozó sebek, mint horzsolások, szakított sebek, biopsziák, nyílt és zárt műtéti sebek.

### ELLENJAVALLAT

Soha ne alkalmazza, ha ismert a beteg érzékenysége a termékre vagy komponenseire.

### JAVASLATOK ÉS MEGFIGYELÉSEK

1. Indokolt esetekben kiegészítő intézkedéseket kell tenni (pl. fokozatos kompresszió alkalmazása vénás lábszárfekélyeknél, vagy nyomáscsökkentő intézkedések felfekvések esetén. Diabéteszes fekélyrel rendelkező betegeknél a vércukorszint ellenőrzése és nyomáscsökkentő intézkedések javasoltak.) 2) A CombiDERM kötszer nedves sebkörnyezetet teremt, ami elősegíti a seb debridálását, ezért előfordulhat, hogy az első néhány kötőcsere után a seb nagyobbak tűnik. 3) A krónikus sebek kolonizációja mindennapi jelenség és nem ellenjavallata a kötszer használatának. Ha a kötszer használata alatt fertőzés alakul ki, a megfelelő antibiotikum terápia alkalmazása szükséges. A kötszer használatát nem kell abbahagyni, de a seb állapotát folyamatosan kell figyelni, és minden kezelésnél orvosi felügyelet szükséges. Klinikai anaerob fertőzés jelenlétében az okklúziós terápia nem javasolt. 4) Ritkán irritáció vagy maceráció jöhet létre a környező bőrfelületen. Néhány esetben előfordult allergiás reakció a kötszer ragasztóanyagával szemben. 5) Mint minden okklúzív kötszernél, néhány esetben túlgranulációt jeleztek. 6) Ez a termék sterilen kerül forgalomba. Amennyiben a csomagolás sérült, ne használja.

### A COMBIDERM KÖTSZER FELHELYEZÉSE

A kötszer steril, ezért figyelmesen alkalmazzuk. Tisztítsa meg a sebet és környékét, öblítse le, majd szárítsa meg. Bizonyosodjon meg arról, hogy a környező bőrfelület mentes minden zsíros anyagtól, mivel ez zavarja a tapadást.

1. Olyan méretű kötszert válasszon, amelynek nedvszívó része nagyobb a sebnél. Ha kötszernek van két füle, fogja meg azt és válassza le a kötszert a védőfóliáról.
2. Távolítsa el a védőfóliát és helyezze a kötszert közvetlenül a sebre. A két fület a helyén lehet hagyni, de ha szükséges el lehet távolítani.
3. A nedvszívó párna a sebváladék felszívása közben megduzzad és megpuhul.
4. A kötszert cserélni kell, ha klinikailag indokolt, vagy ha a megpuhult terület eléri a nedvszívó párna külső szélét, vagy ha szivárog a sebváladék. A CombiDERM kötszert akár hét napig a seben lehet hagyni.

### A COMBIDERM KÖTSZER ELTÁVOLÍTÁSA

A környező bőrt finoman lenyomva óvatosan emelje fel a kötszer sarkát. Addig folytassa, amíg a kötszer minden széle felszabadul. Óvatosan vegye le a kötszert.

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK

Szobahőmérsékleten tároljuk; hidegtől és magas páratartalomtól óvjuk.

ConvaTec Limited,  
Deeside, UK

ORKI 141/98

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.  
1119 Budapest,  
Nándorfejérvári út 35.  
www.replant.hu