

Atrauman[®] Silicone

HU

Termékleírás

Az Atrauman Silicone egy steril, sebbel érintkező szilikon kontaktréteg a traumamentes sebkezeléshez, valamint szervek és egyéb érzékeny szövetek védelmére negatív nyomású sebkezelési terápia alkalmazásakor.

Összetétel

Poli-tereftalát (PET) háló mindkét oldalán szilikongéllal (poli-dimetil-sziloxán) bevonva.

Tulajdonságai és hatásmechanizmusa

Az Atrauman Silicone vékony, puha és könnyen alakítható, sebbel érintkező szilikon kontaktréteg. Megfelelő illeszkedést biztosít a sebalappal, stent olóval a seb méretére és formájára alakítható és vágható. A szilikonréteg

lágyan és biztosan tapad száraz felületekhez, ellentétben a nedves felületekkel. Így a sebbe való tapadást megakadályozza és a kötést fájdalommentesen eltávolítható. A sebbel érintkező szilikon kontaktréteg jól tapad az ép száraz bőrhez, de eltávolításkor nem húz magával bőrszöveteket és nem okoz fájdalmat. Másodlagos kötéssel vagy a Vivano negatív nyomású sebkezelési terápiás rendszerével kombinálva is alkalmazható. Az Atrauman Silicone a sebváladékkal érintkezve elveszíti a tapadó erejét, ennek köszönhetően a kötőcsere trauma- és fájdalommentes. Emellett a Vivano negatív nyomású sebkezelési terápiás rendszer használatakor megakadályozza a szervek és egyéb érzékeny szövetek VivanoMed Foamba történő belenövését. A Vivano rendszerrel végzett negatív nyomású sebkezelési terápia így a szerveken és egyéb érzékeny szöveteken is alkalmazható.

Az Atrauman Silicone nem abszorbeál. A nyitott hálószerkezetnek köszönhetően a váladék akadálytalanul jut át a másodlagos felszívó kötszerbe. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a váladék mennyisége határozza meg a kötőcsere gyakoriságát, ezáltal befolyásolhatja a maceráció kockázatát. Kérjük, tartsa be a másodlagos kötés cseréjére vonatkozó utasításokat.

Negatív nyomású sebkezelési terápia:

A Vivano negatív nyomású sebkezelési terápia rendszerrel kombinálva a szilikon kontaktréteg a sebváladékot a nyitott pórusú, hidrofób VivanoMed Foam szivacs kötszerbe vezeti. Kérjük, kövesse a VivanoMed Foam cseréjére vonatkozó használati útmutatót.

Javallatok

Az Atrauman Silicone egy sebbel érintkező szilikon kontaktréteg, amely alkalmas:

- mindenfajta, akut és krónikus, enyhén és közepesen váladékozó sebek kezelésére.
- kombinálható a Vivano negatív nyomású sebkezelési terápia rendszerrel, különösen olyan területeken, ahol fedetlen szervek és egyéb érzékeny szövetek találhatók.
- alkalmazható védőréteggént a nem váladékozó sebekre és az érzékeny bőrterületekre is.

Alkalmazási utasítások

Amennyiben az Atrauman Silicone-t a Vivano negatív nyomású sebkezelési terápia rendszerrel együtt használják, kizárólag szakképzett egészségügyi dolgozók alkalmazhatják.

A seb előkészítése:

- A kötés első felhelyezése előtt - valamint minden kötőcsere alkalmával - tisztítsa meg a sebet alaposan az orvosi utasításokat betartva.
- Szárítsa meg a seb környéki bőrt.

A sebbel érintkező szilikon kontaktréteg felhelyezése (1-3. ábra):

- Válasszon olyan nagyságú Atrauman Silicone kötszert, amely a seb teljes felületét lefedi. Az Atrauman Silicone megfelelően méretre vágható. Minden esetben steril olót használjon. Ha egynél több Atrauman Silicone-t használ, figyeljen arra, hogy az átfedő darabok a pórusokat szabadon hagyják.
- Vegye ki a Atrauman Silicone kötszert a széthúzó csomagolásból mindkét fedőfóliával együtt.
- Tartsa a hosszabb fedőfóliát erősen, miközben lehúzza a másik fóliát.
- Helyezze a tapadó oldalt a sebre, miközben kismítja az Atrauman Silicone kötszert. Ezután távolítsa el a másik fedőfóliát.

Másodlagos kötés felhelyezése:

- A sebváladék felvétele céljából steril, nedvszívó kötszert (pl. Zetuvit) vagy steril negatív nyomású sebkezelési terápiás kötést kell az Atrauman Silicone fóliához rögzíteni. Kérjük, a Vivano negatív nyomású sebkezelési terápia rendszerrel való kombinálás előtt olvassa el az ide vonatkozó használati útmutatót.

Kötőcsere

- Ha orvosilag ajánlott, az Atrauman Silicone több napig is a seben maradhat a seb állapotától függően. Legalább háromnaponként ellenőrizze, hogy a szarvszövet nem nőtt-e bele a hálóba. Ez különösen fontos, ha szervek és egyéb érzékeny szövetek találhatók közvetlenül a VivanoMed Foammal kombinált sebbel érintkező szilikon kontaktréteg alatt.
- Ha orvosilag ajánlott, kötőcsere alkalmával az Atrauman Silicone kötszert a seben hagyhatja.
- Az Atrauman Silicone kötszer egyszer használatos, soha ne alkalmazza egynél többször!
- Ha az Atrauman Silicone kötszert bőrátültetések rögzítésére használja, nem szabad a kötszert kicserélnie az átültetéstől számított ötödik nap előtt.

Ellenjavallatok

Tilos az Atrauman Silicone alkalmazása, ha valamelyik összetevőjével szembeni túlérzékenység áll fenn.

Különleges biztonsági előírások

- Lenyomatok keletkezésének megakadályozására az alábbi elővigyázatossági intézkedéseket kell figyelembe venni égések „mesh grafts” alkalmazásával való kezelésekor, illetve kozmetikai arckezelések esetén a kötszert kétnaponként helyezze át.
- A vérző vagy sűrű sebváladék esetén rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a szekrérum elfolyása nincs-e akadályozva. Vérző sebek esetén vegye figyelembe a negatív nyomású sebkezelési terápia alkalmazására vonatkozó speciális óvintézkedéseket.
- Szerveken, védőréteggént történő alkalmazásakor különösen ügyeljen a kötési időközokra.
- Az Atrauman Silicone nem véd a szövetek kiszáradásától. Ezért a szerveken és az érzékeny szöveteken történő alkalmazását különös orvosi megfontolás mellett kell végezni.

Különleges útmutatások

Szárazon tárolandó.

Tartalma steril, amíg a belső csomagolások sértetlenek.

Nem sterilizálható újra.

Gyermekektől tartsuk elzárva

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2014-06

HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft. - 2051 Batorbágy, Budapest

060 26000 0614