
 Coloplast A/S
3050 Denmark
IFU11101 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

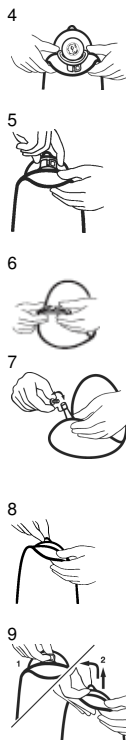

4. A kétrészes zsák felhelyezése

Győződjön meg róla, hogy a zárógyűrű nyitott helyzetben van. A zsákot és az alaplapot nyomja össze lentről kezdve. Futtassa ujját körbe a zsák külső részén található karimán lentről felfelé haladva. Halk kattanás jelzi, hogy a zsák elhelyezkedése az alaplapon megfelelő. A zsák optimális helyzetbe elforgatható.

5. A zsák rögzítése

Zárja be a zárógyűrűt. A kattanás jelzi, hogy a zsák biztonságosan rögzítve van az alaplapon.

6. A zsák zárása

Távolítsa el a klipszet az ívről, és távolítsa el a védőpapírt. Öntapadó felével lefelé helyezze a nyílásra. Ha a klipsz megfelelő elhelyezése nem sikerül elsőre, távolítsa el, és helyezze fel újra. A bőr felé haladva végezzen 4-5 feltekerést, majd hajtse vissza a klipsz végeit. Merev csatra csak a zsák csattal való lezárását megelőző tekerésnél van szükség.

7. Az urosztómazsákok ürítése

Emelje a kifolyócső végét felfelé, és nyomja össze, ezután húzza ki a dugót, enyhítsen a kifolyócsőre gyakorolt nyomáson, majd ürítse ki a zsákot. Az ürítés elvégzése után győződjön meg róla, hogy a kifolyócső lezárása tökéletes, és a záródugó teljesen vissza van illesztve.

8. Az egyrésztes zsák eltávolítása

A zsákot úgy távolítjuk el, hogy lassan és óvatosan lehúzzuk a bőrről, miközben a bőrt szorosan fogva tartjuk a másik kezünkkel.

9. A zsák és az alaplap eltávolítása

A zsák:

1. A kis fület ujjhegygel nyomva nyissa ki a zárógyűrűt!
2. Távolítsa el a zsákot az alaplapról egyszerre felemelve és húzva azt. Ez könnyebben sikerül, ha a zsák tetejét fogja.

Az alaplap:

Az alaplapot a bőrről lassan és óvatosan lefelé húzva távolíthatja el, úgy, hogy a bőrt mindeközben másik kezével fogva feszesen tartja.

Figyelem

Ennek az egyszer használatos eszköznek többszöri alkalmazása potenciális veszélyt jelent a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így a fizikai sérülés vagy a fertőzés további kockázatnövekedését jelentheti a beteg számára.



Figyelmeztetés

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amely a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származik.

Rendeltetészerű felhasználás

Az Alterna bőrhöz tapadó lap és sztómazsák a sztómán kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az öntapadó lap a sztóma körüli bőrhöz tapad, és így a sztómazsák megfelelő helyzetének kialakítását szolgálja.

Használata:

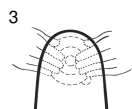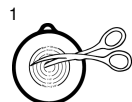

1. Az alaplap kivágása

A sztóma méretét és formáját rajzolja rá a sztómasablonra. A sztóma méretéhez és alakjához illeszkedve vágja ki a nyílást. Legkönnyebben hajlított végű ollóval teheti meg ezt. Az alaplap utolsó körén túl ne vágjon. Az alaplap felhelyezése előtt tisztítsa meg, majd törölje szárazra a bőrt.

2. A védőpapír eltávolítása

Először távolítsa el az átlátszó védőpapírt! Hüvelykujját helyezze a fültre, majd a másik kezével húzza le a védőpapírt!

3. Az egyrésztes zsák és a kétrészes alaplap használata

Helyezze az öntapadó alaplapot a bőrré a sztóma körül, pontos illeszkedést biztosítva. Az ujjakkal alulról felfelé haladva finoman, de biztosan nyomja a bőrré.