



Coloplast A/S  
3050 Denmark

IFU10314 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.

© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

#### Figyelem

Ezen egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így nagyobb eséllyel léphet fel fizikai sérülés vagy fertőzés a betegnél.

#### Figyelmeztetés

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amelyek a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

#### A Conveen Security + öntapadó vizeletkondom használata



- Vágja le a szeméremszőrzetet, ha szükséges.
- Mossa és szárítsa meg a hímvessző területét.

1. A felnyitáshoz a csomagolást az egyik végétől a másikig tépje fel.



2. A felhelyezés megkönnyítéséhez fogja 2 ujjá közé az applikátort. Helyezze rá a vizeletkondomot a makkra, de hagyjon 1 cm-es rést a makk és a kivezetőcső között. Másik kezével húzza lassan a papírcsik végét maga felé, ezzel egyenletesen tekerje le a vizeletkondomot.

3. Dobja ki az applikátort.



4. Enyhén nyomja rá a vizeletkondomot a hímvessző tövére, hogy a bőrhöz tapadjon. Nincs szükség külön ragasztóra. A vizeletkondom 24 órán keresztül lehet a hímvesszőn, és tilos a vizeletkondomokat újraalkalmazni!



5. Csatlakoztassuk a vizeletkondomot egy Conveen vizeletgyűjtő zsákhoz. A kondom a kivezetőnyílásnál egy csatlakozó gyűrűvel rendelkezik a vizeletgyűjtő zsák könnyebb csatlakoztatása érdekében.



6. Eltávolításhoz: válassza le a vizeletkondomot a vizeletgyűjtő zsákról, majd óvatosan tekerje le a vizeletkondomot a hímvesszőről.