

### Készlet

Vizelet-lecsapoló katéter hozzákapcsolt gyűjtőtasakkal időszakos katéterezésre.



Coloplast A/S  
Høftedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Használati útmutató

23315150 Version 1

Coloplast logó Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. © [2013-11]

### Javallat

Steril vizelet-lecsapoló katéter időszakos használatra.

### Információ

Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

A csomagolás kibontása után a lehető leghamarabb el kell végezni a katéterezést. Amikor a húgyhólyag kiürült, a katétert minden esetben el kell távolítani.

### Vigyázat

Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

Mielőtt először önkatéterezést végez, kérjen tanácsot kezelőorvosától.


Kérjen tanácsot kezelőorvosától, ha:

- tüneteket tapasztal, úgymint láz, kellemetlen érzés a húgyhólyag ürítésekor, gyakori vizeletelési inger vagy véres vizelet.

### Figyelmeztetés

Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy fertőzés fokozott kockázatával jár.

A termék ftalátokat tartalmaz, és orvosi jóváhagyás nélkül nem alkalmazható gyermekeknél, illetve terhes vagy szoptató nőknél.

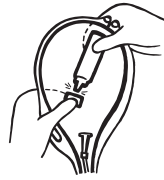

1. Nyissa ki a csomagolást és vegye ki a szettet. Törje fel az ampullát, majd csavarja a benne található vizelet a tasakba. A tasakkal ellátott katétert tartsa olyan módon, hogy az eszköz benedvesedjen.



2. Várjon legalább 30 másodpercig.

MIN. 30 SEC.



3. Fordítsa a feje tetejére a tasakot, húzza vissza a katétert, majd bontsa ki a perforáció mentén.



4. A lelógó tasakból kinyomva vezesse óvatosan a katétert a húgycsőbe. A vizeletfolyás befejeződésével húzza kijebb a katétert 2-3 cm-rel. Ha a vizeletfolyás újra megindul, várjon pár másodpercig, majd húzza még kijebb a katétert 1-2 cm-rel. Óvatosan húzza vissza a katétert a tasakba, miután a hólyag kiürült.



5. Kössön csomót a tasakra.



6. Dobja ki egy szeméttárolóba vagy a másik végét kinyitva ürítse ki a tartalmát.

### Szimbólum



DEHP  
DBP

Ftalátot tartalmaz: di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és dibutil-ftalát (DBP) keveréke



Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.