


Security + lábzsák

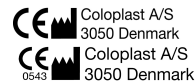

Security + lábzsák, nem steril

Security + lábzsák, steril

IFU10292 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

Kiürítése könnyebb lehet, ha a művelet előtt kigombolja vagy eltávolítja az alsó rögzítő pántot.



A zsák kiürítése után mindig zárja el a leeresztő csapot! A leeresztő csap elzárásához nyomja felfelé a kapcsolót, amíg az a helyére nem kattann.

7. Kizárólag steril zsákok esetén.

Szükség esetén vizeletminta vehető a mintavételi nyíláson keresztül. A mintavételi nyíláson keresztüli vizeletminta-vétel egyszerűbb, ha azt enyhén ferde helyzetű zsáknál veszi le.

8. Az úrtartalom további, éjszakai használatához való növeléséhez, a Conveen Security + lábzsákhoz Conveen éjszakai vizeletgyűjtő zsákok csatlakoztathatók. A lábzsák és az éjszakai vizeletgyűjtő zsák csatlakoztatásakor bizonyosodjon meg arról, hogy az éjszakai vizeletgyűjtő zsák kivezető nyílása teljesen el van zárva. Nyomja rá határozottan az éjszakai vizeletgyűjtő zsák csatlakozóját a Conveen Security + lábzsák kivezető csövére, és nyissa meg a lábzsák leeresztő csapját ahhoz, hogy meginduljon a vizelet.

Az éjszakai vizeletgyűjtő zsák eltávolításához zárja el a lábzsák leeresztő csapját, majd óvatosan csavarja le az éjszakai vizeletgyűjtő zsák csatlakozóját a lábzsák kivezető csövéről. Ne érintse meg a csatlakozó nyitott végét, és mindig mosson kezet a csatlakoztatás/lecsatlakoztatás előtt és után.

A zsákok a helyi előírásoknak és javallatoknak megfelelően cserélje ki.

Figyelem

Az egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így nagyobb eséllyel léphet fel fizikai sérülés vagy fertőzés a betegnél.

Figyelmeztetés

Az egyenként csomagolt termékek sterilmek mindaddig, amíg a csomagolást fel nem nyitották, vagy az meg nem sérült. A terméket tilos újratesterilizálni! Egyszer használatos eszköz.

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért, amelyek a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.


A Conveen Security + lábzsák használata




1. Ha a csatlakozó nincs előzetesen a csőhöz csatlakoztatva:
A) A csövet az igényeknek megfelelően, annak sima részénél bármilyen hosszúságúra vághatja egy közöséges olló segítségével. Ahhoz, hogy a cső és a csatlakozó közötti kapcsolatot biztosítsa, a vágásnál hagyjon meg a sima részből annyit, amennyi csak lehetséges.

B) A csatlakozó csőhöz történő csatlakoztatásához, szorítsa össze a csövet pár centiméterre annak végétől, majd nyomja be a csatlakozót a csőbe ameddig csak lehetséges.

Amennyiben a csatlakozó csatlakoztatva van a csőhöz.

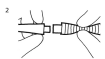

2. A Conveen Security + lábzsák leeresztő csapja a zsákok csomagolásakor mindig nyitott állapotban van. A zsák használata előtt zárja el a csapot! A leeresztő csap elzárásához nyomja felfelé a kapcsolót, amíg az a helyére nem kattann.

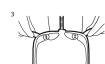

3. Rögzítse a zsákokat a lábához a csomagban található Conveen rögzítő pánttal. Ahhoz, hogy a zsákokat a lábához rögzítse, bújtsa át a gombokat a lyukakon a pánt mindkét végén, és igazítsa meg a pántokat úgy, hogy azok kényelmesen álljanak. Ne húzza szorosra a rögzítő pántokat, mivel ezzel károsíthatja a keringését. A lelógó, felesleges pántdarabokat levághatja.
40 °C-on mosva, a szíjak legfeljebb 2%-kal mennek össze.



4. Amennyiben a csatlakozó védőkupakkal rendelkezik, távolítsa el azt.



5. Csatlakoztassa a csatlakozót a vizeletkondomhoz, vagy a katéterhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a cső nem törik meg, és így nem zárja el a vizeletáramlás útját.



6. A zsák kiürítéséhez, irányítsa a csövet a WC-be vagy egyéb megfelelő tartályba, és nyissa meg a leeresztő csapot. A zsák