

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetészerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

46/508-283

3300 Eger, Knézich Károly u. 20.

36/320-826

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.

35/300-224

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

47/560-130

3600 Ózd, József Attila u. 31/A

48/569-239

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AH-53 Kétoldali lágyéksérvkötő

Méret táblázat

Derékméret cm-ben
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120

1. Általános ismertető:

A kétoldali gumiöves sérvkötő a test vonalát követő puha derékövből, a sérv helyzetét megfelelően tartó pelottákból, amelyekre bőr bevonatú nyomópárnák vannak felerősítve, és puha párnázott hátpárnából áll. A derékövhöz a sérvpelottákat combszalag szíjjal lehet rögzíteni.

2. Javallat:

Kis lágysérv esetén amennyiben a beteg nem műthető, illetve műtét után gyenge hasfali izomzat a recidiva megakadályozása céljából alkalmazható.

3. Felvétele és használata:

A sérvkötő felvétele kisebb sérvек esetében álló, nagyobb sérvек esetében fekvő helyzetben, a sérv visszahelyezése után meztelen testre történik. A sérvkötőpárnát abba a kézbe kell venni, amelyik sérvpelotát először helyezük a sérvkapura, majd a derékövet a hátpárnával körbevezetjük a csípőtájékon. Ezután a másik pelottát is a sérvkapura helyezük, az összekötő bőrszíjat becsatoljuk a sérvpelotta felső, a combszalagon levőket a lábak között átvezetve az alsó gombjaira. A körbőséget hátul csatos szíjjal lehet beállítani. A rögzítést úgy kell beállítani, hogy fájdalommentesen szorítsa a sérvkötő párnát a sérvkapura. A felhelyezés és használat során minden esetben tartsuk be az orvos utasításait! Amennyiben a használat során kérdés, illetve probléma merülne fel, forduljon a kiszolgálást végző szakemberhez!

A sérvkötőt általában éjszakára le kell venni, mert a bőrnek szüksége van regenerálódásra a felfekvés elkerülése végett.

4. Tisztítása:

A sérvkötő tisztán tartása nagy gondot igényel. Óvni kell a nedvességtől, vízben mosni tilos. A készüléket benzines ruhával lehet tisztítani a tűzrendészeti előírások betartásával.

5., Szavatosság:

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

6. Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat:

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechnikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG MEG
KELL ŐRIZNI !**

