

ZSÁK felhelyezése kétrészes termékeknél.

1.



Illessze a zsák körgyűrűjét az alaplap körgyűrűjéhez

2

A felhelyezés zárt és nyitott zsákoknál ugyanúgy történik. Ujjal nyúljon az alaplap elemelhető záró gyűrűje alá, majd alulról felfelé haladva fokozatosan nyomja körbe a zsákgyűrű területét, amíg a zsák tökéletesen nem zár. Amikor érezte, hogy a gyűrű körkörösén bepattant, a zsákot enyhén lefelé húzva győződjön meg arról, hogy az szilárdan kapcsolódott e az alaplaphoz.

3

Nyitott zsák használatánál először a zacskót kell lezárni. A zárás lehetséges zárócsattal vagy zárócsíkkal.

❖ Zárócsattal



A zacskó nyakrészét hajtsa rá a csat pengéjére, ujjával szorítsa le, majd fordítsa a csat tokjába és a rugózó záró résszel rögzítse.

❖ Záró csíkkal



Távolítsa el a védőborítást a ragasztócsíkról. A zsák nyílórészének 2-3 felfelé tekerése után a záró csíkot az alaplappal ellentétes oldalra hajtsa be szoros illesztéssel.

4

A szűrőtakaró a szűrő lezárására / pld. zuhanyozásnál / illetve a zsák időszakos gáztalanítására szolgál

5

A zacskó eltávolítását az alaplapról felülről lefelé történő óvatos lefejtésével éri el. A szótómazsákok nyitása a zárással ellentétes módon lehetséges. A zsák ürítése után a nyílást ajánlatos kívül-belül nedves törlővel megtisztítani.