

# Használati útmutató



## Activ fürdőkádülőke, fix

### **Az eszköz rendeltetése:**

Alsóvégtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén. A fürdőkád ülőke idős, vagy mozgásában korlátozott személy által használható, melynek eredményeképpen nem kell a használót a kádba ültetni. Ez elősegíti a kádba való be és kiszállást, illetve a segítő feladatát. Hagyományos (hosszú) kádak esetén alkalmazható, ahol két oldalt az ülőke feltámaszkodhat a kád szélére. Az ülés váza szinterezett acél cső, az ülés műanyagból készül.

### **Beállítás, első használat:**

A termék előzetes beállítást nem igényel.

### **Technikai paraméterek:**

Terhelhetőség: 100 kg

### **Alkalmazás, használat:**

A termék standard szélességű kádhhoz illeszthető. Fontos, hogy a gumi támasztékok a kád szélén legyenek.

### **Karbantartás, állagmegóvás:**

Az eszköz karbantartást nem igényel.

### **Figyelmeztetések:**

- A fürdőkád ülőke csak a kád irányába helyezhető fel, keresztben, tehát a kádra merőlegesen nem.
- A felhelyezés után ellenőrizni kell, hogy mind a négy láb a kád szélén van.

### **Megfelelés:**

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

### **Garancia:**

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén, 6 hónapon belül érvényesíthet.

**Gyártó / Forgalmazó:** Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.