

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BUGGY CORZO

GYERMEKKOCSI



szimbolikus fotó

Figyelem!

Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy:

- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!
- Mind a gyermek neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás!

A gyermekkosci - mint gyógyászati segédeszköz - **szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata** és kötelessége. Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabály által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a gyermekkosci jótállásban javítandó hibájának.

Kedves vásárlónk!

A "BUGGY CORZO" kategóriájában egyedülálló gyermekkocsit kifejezetten mozgássérült gyermekek számára fejlesztették ki, a gyermek rövidebb idejű biztonságos elhelyezésére. A gyermekkocsihoz nagy választékban rendelhetők speciális rögzítő alkatrészek, ezért különböző sérülések széles skáláján is jól használható.

Használat előtt kérjük, olvassa el a **használati útmutatót**.

Amennyiben az eszköz használatával kérdése merülne fel, keresse fel szakembereinket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- ❖ használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót
- ❖ biztonsági okokból használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az állítócsavarok, illetve a rögzítőelemek fix állapotban vannak.
- ❖ használatához kérje ki orvos szakvéleményét
- ❖ az eszköz használójának ismernie kell az ebben a tájékoztatóban leírtakat
- ❖ elindulás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek kényelmesen ül, ruha vagy egyéb tárgy a kerekek útjába nem került
- ❖ álló helyzetben, valamint be- és kiszálláshoz a kerekeket minden esetben rögzítse
- ❖ járdára hajtás esetén soha ne döntse előre a széket
- ❖ a széket buszon, illetve egyéb járműveken a gyermek szállítására ne használja
- ❖ tilos járműben ülésként használni, ülésként lekötöni
- ❖ ügyeljen, hogy a gyerekek ne használhassák játékként az eszközt
- ❖ ne használja az eszközt rendeltetésétől eltérően
- ❖ szállítás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek testrészei mozgó alkatrészekhez nem érnek
- ❖ a gyártó nem vállal felelősséget mások által gyártott tartozékok használatából eredő balesetekért, károkért
- ❖ használat közben legyen figyelmes, hogy elkerülje az ütközéseket és egyéb veszélyhelyzeteket
- ❖ ügyeljen a háttámla és az ülés beállításánál a hirtelen mozdulatokra
- ❖ ne engedje, hogy a gyermek felügyelet nélkül szálljon ki-, illetve be a kocsiba

- ❖ ne terhelje túl a kocsit csomagokkal, több gyermekkel, nem eredeti tartozékokkal
- ❖ ügyeljen arra, hogy a rögzítő tartozékok mindig a gyermek méretére legyenek beállítva, és rögzítve. A használatnak ezek kezelésével tisztában kell lennie.
- ❖ ügyeljen, hogy a gyermek soha ne álljon a lábtartóra, mivel nem ekkora terhelésre tervezték
- ❖ **soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban**
- ❖ A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért sem a gyermek, sem a használó, sem harmadik személy tekintetében.

FIGYELMEZTETÉS

A fogantyúra akasztott tárgyak befolyásolják a kocsi stabilitását. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban tartózkodni. Beállítás közben az ujjait tartsa távol a teleszkópoktól.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

A kocsi kinyitása

Helyezze az összecukott kocsit a kerekeire, oldja a tároláshoz használt rögzítőt, fogja meg határozottan az egyik fogantyút, és nyomja lefelé az ülés vázát az ellenkező oldalon. Nyomja le az ülés vázát, hogy ellenőrizhesse, a kocsi teljesen kinyílt. A hátsó merevítőt a lábával rögzítse. A kocsi nem csukódhat össze. A kartámasz párnázatát rögzítse a kartámaszra, majd szerelje fel a lábtartót.

FIGYELJEN, HOGY KINYITÁS KÖZBEN AZ UJJA NE SÉRÜLJÖN MEG!

Lábtartó felszerelés

A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, nyomja meg a lábtartó vázának hátsó felén található rögzítőcsapokat, helyezze a lábtartót a legalsó pozícióba, és rögzítse a rögzítőkarokkal.

Lábtartó magasságállítás


A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, nyomja meg a lábtartó vázának hátsó felén található rögzítőcsapokat, állítsa a lábtartót a kívánt pozícióba, és rögzítse a rögzítőkarokkal.

Lábtartó leszerelés

A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, állítsa a lábtartót a legalsó pozícióba, nyomja meg a lábtartó vázának hátsó felén található rögzítőcsapokat, így a lábtartó leszerelhető.

Rögzítőfék

A kerekeken található fékkarokat teljesen nyomja le. A fék kioldásához a fékkarokat húzza fel.

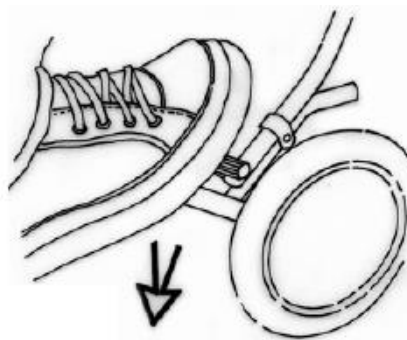

Biztonsági öv

Oldja a csatokat, ültesse a gyermeket a kocsiba, majd állítsa be az övet a kívánt hosszúságra, és kapcsolja be. A vállpánt a vállal egyvonalban, vagy magasabban kerüljön átvezetésre a háttámlán kialakított nyílásokban. A vállpántokat rögzítse a kocsi hátsó vázához.


Ülésmerevítés

Az ülés merevségét beállíthatja az ülés szíjainak lazításával illetve feszítésével.

Beszállás

Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannak-e. a szükséges, szerelje le a lábtartót. Ha lehetséges, a széket állítsa háttal a falnak, vagy egyéb, nem mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy segítő is tarthatja a széket a beszállás alatt).

Hajtsa a lábtartót lehetőség szerint függőleges állásba, és hajtsa fel. Ültesse a gyermeket a székbe, rögzítse az övekkel, illetve egyéb rögzítő eszközökkel, és állítsa be a lábtartót. Figyeljen, hogy a gyermek kényelmesen üljön.

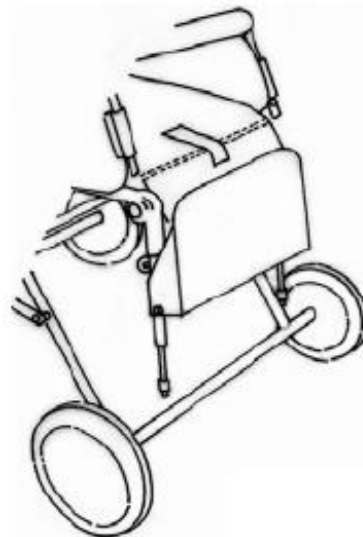

Kiszállás

Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannak. Ha lehetséges, a széket állítsa háttal a falnak, vagy egyéb, nem mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy segítő is tarthatja a széket a kiszállás alatt).

Oldja az öveket, illetve egyéb rögzítő eszközöket, és óvatosan emelje ki a gyermeket.

Járda / egy lépcsőfok

Ha járdáról, vagy egy lépcsőfokról lefelé kíván haladni, tolja a kocsit az első kerekeivel a járda / lépcső széléig, határozottan fogja meg a fogantyúkat, és döntse enyhén hátra a széket a hátsó kerekeire. Tolja a hátsó kerekeken a széket lassan a járda szélére, majd óvatosan eressze le az út szintjére. Soha ne döntse a széket előre!

Ha járdára vagy egy lépcsőfokra kíván felmenni, óvatosan döntse hátra a széket, az első kerekeket tegye fel a járdára, majd tolja előre, és emelje fel a hátsó kerekeket is a járdára.

Lépcső

Ha lehetséges, liftet vagy rámpát használjon. A lépcsőt csak akkor használja, ha nincs más lehetőség. A lépcsőn való közlekedéshez legalább egy segítőre lesz szüksége.

Soha ne próbálja meg a széket a lépcsőn egyedül fel, illetve levinni, ha Ön és segítője nem biztosak benne, hogy az eszközt és a gyermeket magabiztosan elbírnák, a széket biztonsággal meg tudják fogni.

Emelésnél a fogantyút minden esetben fogni kell!


Soha ne emelje fel a széket a biztonsági rúdnál vagy a lábtartónál!

Lefelé haladáshoz tolja a széket a lépcső széléhez, óvatosan döntse hátra a hátsó kerekre, majd tolja lassan a lépcső széléhez.

A segítő fogja meg a keret első részét, kicsit emelje meg, és tartsa addig, amíg a hátsó kereket óvatosan a következő lépcsőfokra engedik.

Az eljárást ismételjék a lépcső aljáig.

Felfelé haladáshoz a hátsó kerekkel álljon az első lépcsőfok elé, döntse óvatosan hátra, majd a segítő emelje meg az első részt a keretnél fogva, miközben a következő lépcsőfokra emeli a hátsó kerekeket.

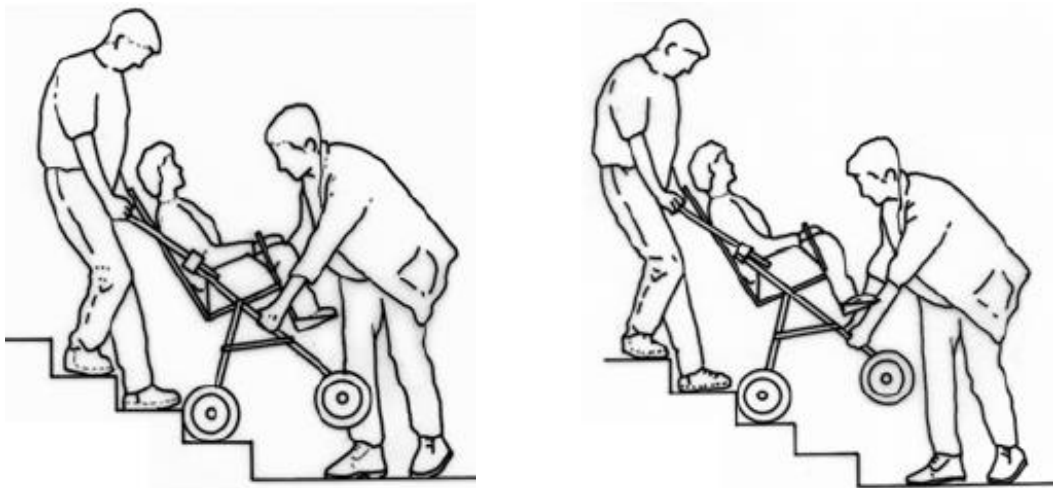

Összecsukás

Távolítsa el a kartámasz párnázatát, illetve az egyéb felszereléseket (pl. napvédő) a hátsó rögzítést a közepének felfelé nyomásával oldja ki. Fogja meg határozottan az egyik fogantyút, és húzza felfelé az ülés vázát az ellenkező oldalon. Helyezze vissza a tárolásra szolgáló rögzítőt. Szükség esetén a lábtartót szerelje le.



Kárpitok

A kárpitozás nem leszerelhető, meleg vízzel, semleges mosószerrel tisztítható. A kartámasz párnázata kézzel, maximum 40 fokos vízben semleges mosószerrel mosható.


Karbantartás

Ezt a gyerekkocsit úgy tervezték, hogy a megfelelő használat és karbantartás mellett évekig hibátlanul használható legyen. A gondtalan használat érdekében végezze el az alábbiakat:

- ❖ rendszeresen ellenőrizze a fogantyút, a biztonsági rúd rögzítéseit, a zárat, a lábtartót, a csatlakozókat, hogy megfelelően működnek.
- ❖ a fékek, kerekek illetve abroncsok a használat során kophatnak, ezeket szükség esetén ki kell cserélni
- ❖ javasoljuk, hogy az eszközt évente nézesse át szakemberrel
- ❖ amennyiben az eszköz meghibásodik, kizárólag az erre felhatalmazott szerviz végezhet javításokat az eszközön
- ❖ csak eredeti alkatrészek használhatók a javításhoz
- ❖ amennyiben az eszköz egyes részei szorulnak, vagy nehezen működnek, bizonyosodjon meg róla, hogy nem valamilyen szennyeződés okozza ezt, és alkalmazzon egy kevés kenőanyag spray-t (pl. WD40). Ne használjon zsírt vagy olajat. Ügyeljen, hogy a megfelelő alkatrészek közé jusson elegendő kenőanyag, de ne használjon túl sokat ezekből, mert ez szennyeződést okoz. A fölösleges anyagot mindig törölje le.
- ❖ A rendszeres kenés meghosszabbítja az élettartamot, és könnyebb kezelhetőséget biztosít.
- ❖ Ismerje meg az eszköz használatát alaposan. Minden esetben könnyedén kell szétnyílnia, illetve összecukódnia. Soha ne erőltesse az alkatrészeket, mindig olvassa el a használati útmutatót!
- ❖ a kerekek, a fém és műanyag alkatrészek semleges mosószerrel, kézmeleg vízzel tisztíthatók
- ❖ soha ne használjon erős tisztítószereket, alkoholt, ammónia vagy klór tartalmú anyagokat.
- ❖ amennyiben az eszközt nedvesség éri, törölje át száraz ruhával, és nyitott állapotban jól szellőző, meleg helyen hagyja megszáradni
- ❖ minden esetben száraz, biztonságos helyen tárolja az eszközt.

A gyártó fenntartja a jogot az ezen útmutatóban foglaltak, illetve a termék megváltoztatására előzetes jelzés nélkül.

A kocsi részei

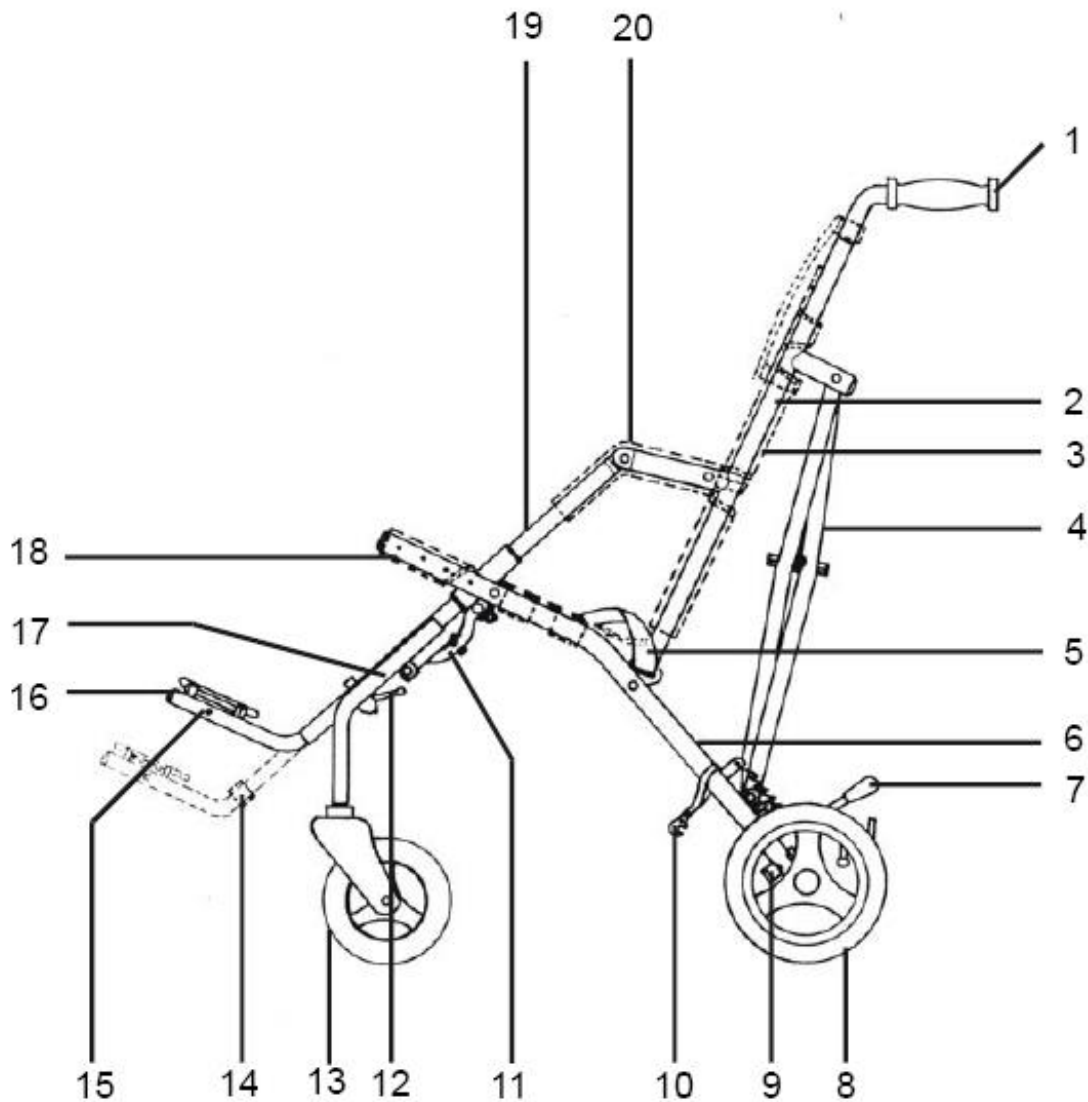

1. fogantyú

2. háttámla váz

3. háttámla

4. hátsó merevítő

5. biztonsági öv

6. ülés váz (hátsó)

7. fék

8. hátsó kerekek

9. hátsó merevítő

10. rögzítő tároláshoz

11. első merevítő

12. lábtartó rögzítő

13. első kerekek

14. lábszártámasz

15. rögzítőcsap

16. lábtartó

17. rögzítőcsap

18. ülés

19. első váz

20. kartámasz párnázat

Műszaki adatok

	S (30)	M (34)	L (38)
Háttámla magassága (mm)	510	660	860
Beülőség (mm)	300	340	370
Beülómélység (mm)	260	380	380
Ülés - lábtartó távolság (mm)	170-370	270-470	270-470
Háttámla dőlésszöge	115 fok	115 fok	115 fok
Ülés dőlésszöge	25 fok	25 fok	25 fok
Teljes hossz (mm)	1110	1140	1140
Teljes szélesség (mm)	555	595	635
Teljes magasság, fogantyúval (mm)	930	1010	1010
Tömeg (kg)	12	12	14
Maximális terhelhetőség (kg)	45	55	75
Hossz összecukott állapotban (mm)	1160	1235	1235
Szélesség összecukott állapotban (mm)	360	360	365
Magasság összecukott állapotban (mm)	310	360	365
Javasolt guminyomás elöl / hátul (kpa)	230/230	230/230	230/230

Napvédő (RPRK00105) - rendelésre

Rögzítés


a háttámla keretére szerelje fel a napvédő tartóelemeit, majd szerelje fel aznapvédőt.

Leszerelés

Oldja a napvédő rögzítéseit, és emelje ki a napvédőt a tartóból.

Beállítás

Húzza fel vagy nyomja le a napvédő tetejét. A napvédő oldala letekerhető az oldalsó védelem beállításához


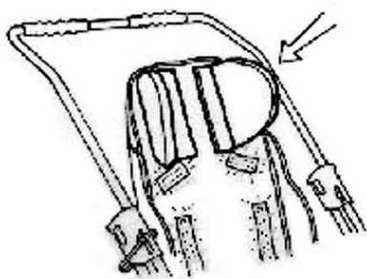


Fejtartó (RPRK002) - rendelésre

A fejtartó csavarjait dugja át a kárpitban, illetve a háttámlában kiképzett lyukakon, majd rögzítse anyacsavarokkal a fejtartót és, csúsztassa rá a fejtartó párnáját.

Oldalsó törzstámasz (RPRK003) - rendelésre

Ültesse a gyermeket a székbe, majd keresse meg a törzstámasz megfelelő magasságát (a törzstámasznak a gyermek hónaljánál kell lennie). Vegye ki a gyermeket a székből, keresse meg a megfelelő rögzítő lyukakat a háttámla oldalán. A megfelelő pántokra vágjon kis lyukakat, a törzstámasz csavarjait dugja át a lyukakon a háttámla vázába, majd anyacsavarokkal rögzítse.

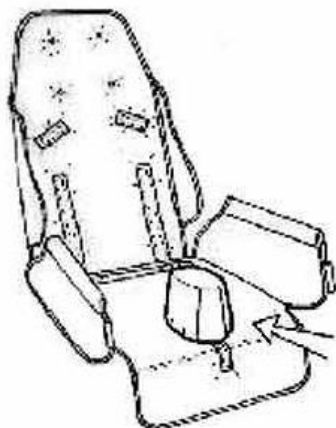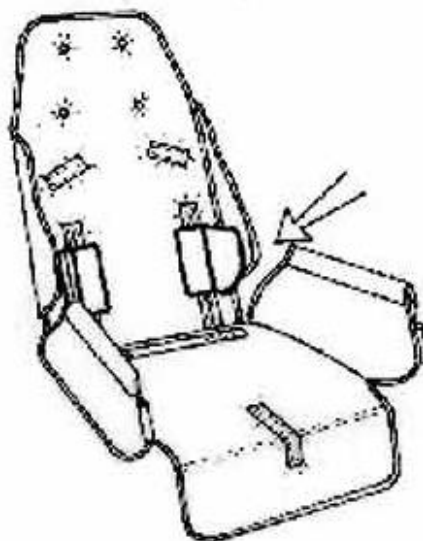

Terpesztő ék - rendelésre

Ültesse a gyermeket a székbe, majd keresse meg a terpesztő ék megfelelő helyét. Vegye ki a gyermeket a székből, keresse meg a vázon a rögzítő lyukat, vágjon a csavarnak egy kis lyukat, majd helyezze be a blokkot és rögzítse egy anyacsavarral (a keskenyebb rész nézzen a háttámla felé)

I. JÓTÁLLÁS

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott termékre. **A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.**

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá válik.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt bekövetkezett be,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből, felborulásból származó sérülésekből következett be (pl.: váz sérülése),
- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után keletkezett okból következett be

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:

- a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, a gumik (köpeny és tömlő), üléskárpit-, karfakopás és sérülés.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:

- A terméken a jótállást vállaló szervén kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.
- A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
- A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett terhelést.
- Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
- A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

Szervizek

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a használati útmutató végén található **Szervizkönyvben** feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
- a főszervelécek cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Gyártó:

PATRON Bohemia s.r.o.

Ceskolipska 3419, CZ-27601 Melnik, Czech Republic

Tel.: (+420) 315-630-135, 315-630-111, Fax: (+420) 315-630-199

Forgalmazó:

Rehab Zrt.

A **MEDORT** csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út. 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330



**A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA
SZERZŐDÖTT PARTNEREI:**

SZERVIZKÖNYV

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606
	Tel.: 06/1 783-3869
	Tel.: 06/20 950-4735
	Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137
	Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7196
	Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.	Tel.: 06/1 230-0593
---	---------------------

MEDIPLUSZ KFT.

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.	Tel.: 06/74 413-238
---------------------------------------	---------------------

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jóállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

..... gyártási számú kerekesszékhez

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Gyermekkocsi

Az eszköz típusa: Buggy Corzo

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY BUGGY CORZO gyermekkocsihoz	TAJ szám:
Eladószerv tölti ki!		
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre (szerviz tölti ki)		Levágandó jótállási, javítási szelvények (eladó tölti ki)
Bejelentés időpontja: 5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5	
Bejelentett hiba:	Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4	
Bejelentett hiba:	Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	
Bejelentett hiba:	Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	
Bejelentett hiba:	Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		
Bejelentés időpontja: 1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	
Bejelentett hiba:	Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi	
Elhárított hiba leírása:	Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:	Kelt: 20..... hó nap	
Munkalapszám:	Eladó aláírás (P.H.).....	
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		