

Használati útmutató



Activ egyenes kapaszkodó

Az eszköz rendeltetése:

Tartós vagy maradandó mozgáskárosodással élőknek, egyensúlyzavarban szenvedőknek. A termék a fürdőkádban, egyéb helyeken való megcsúszás ellen véd, mivel az ilyen és hasonló kritikus helyeken jó kapaszkodási lehetőséget nyújt. Tetszőleges helyen és irányban felszerelhető: szoba, lépcsőház, fürdőszoba, zuhanyzó, WC.

A termék főbb részei:

1. Kapaszkodó 1 db
2. Csavarok, tiplik 6-6 db

Beállítás, első használat:

Az első használat előtt a kapaszkodót fel kell szerelni a helyére. Ehhez a hozzáértő ember segítségét kérje, aki meg tudja oldani falra való felszerelést tiplikkel és csavarokkal. (ezek mellékelve található). A felszerelés a lakásban bárhol történhet. A felszerelés előtt a használóval végezzenek próbát, hogy a megfelelő magasságban és irányban legyen a kapaszkodó felrögzítve. A rögzítéshez minden mellékelt csavart fel kell használni. Ügyeljen arra, hogy a falfelület megfelelő szilárdságú legyen (pl. gipszkarton falra nem szerelhető). A felszerelés után ellenőrizze a felszerelés tartósságát.

Amennyiben a kapaszkodó lötyögni kezd, vagy a tipli kihúzódik a falból, kérje szakember segítségét és felrögzítést erősítse meg, vagy szereltesse át a kapaszkodót.

Technikai paraméterek:

Terhelhetőség: 100 kg

Méretek:

A termék több méretben készül: 30-40-50-60 cm

Karbantartás, állagmegóvás:

A termék karbantartást nem igényel.

Figyelmeztetések:

- Felszereléshez 3 mm-nél vékonyabb csavart nem szabad használni
- Minden furatot fel kell használni a rögzítéshez.
- A kapaszkodó nem szerelhető fel gipszkarton, pozdorja fal felületére.
- Időnként ellenőrizze, hogy a kapaszkodó nem mozdult-e el a helyéről akár ön, akár hozzátartozója használja a kapaszkodót.

Megfelelés:

Az eszköz megfelel a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt és rá vonatkozó alapvető követelményeknek. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, kezelő, vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Garancia:

Szavatosság a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, amelyet a vásárlás helyén 6 hónapon belül érvényesíthet.

Gyártó / Forgalmazó: Ortoprofil kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.