

# C.H.E.C.K<sup>TM</sup> arthrozis és hyperextenzió kezelő készülék

Szabadízületes térdortézis, egyedülálló vízszintes keresztmerezítéssel, mely az ízületet párhuzamosan tartja, ugyanakkor függőlegesen teljes szabad, független mozgást hagy. A lábhoz természetes, biztosítva az optimális komfortérzetet és megfelelő funkcionális teljesítést. Rögzítése puha bevonatú tépőzáras pántokkal Nincs szükség mechanikai behatárolókra, mert a pántok segítségével beállítható. Ezért rendkívül könnyű és egyedülállóan magas komfort érzetet nyújt viselőjének.

## Indikációs kör:

- Térdízület hyperextenziója
- Térd hyperextenzióval járó bénulás
- Szalagnyúlás miatti instabilitás

## Tisztítás:

Távolítson el minden párnázást és hevedert a fém vázról. Mosás előtt valamennyi tépőzárát zárja össze. A fém vázat langyos, szappanos vízzel tisztítsa.

## FIGYELMEZTETÉS:

- NE HASZNÁLJA az ortézist intenzív sportolás, futás közben!
- Külön tartozékként kiegészítő párnázás is kapható. Forduljon ortopédiai technikushoz!
- Fordítson kellő figyelmet lábának állapotára!
- Minden használat előtt, naponta ellenőrizze az ortézis állapotát, és ha bármi szokatlant észlel, forduljon technikushoz.

## AZ ORTÉZIS FELHELYEZÉSE ÉS LEVÉTELE:

Győződjön meg róla, hogy az ortézis hátsó oldalán lévő valamennyi heveder rögzítve van-e és hogy a párnázás úgy helyezkedik-e el, ahogy az a fenti ábrán látható. A térd 45 fokban hajlított helyzetében helyezze fel az ortézist a végtag hátsó felszínére.

1. Először az alsók közüli felső hevedert rögzítse.
2. Ezután az alsót.
3. Majd a felsők közüli alsót,
4. végül a legfelsőt.

Ellenőrizze, hogy az ortézis kényelmesen illeszkedik-e a végtagra.

Az eltávolításhoz az elülső pántokat csak az egyik oldalon nyissa ki, a hátsókat pedig tartsa összezárva. Amennyiben szokatlan változásokat észlel magán (pl.:panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát

**OTH Regisztráció:** 35316/2001

EAN kód:

**Gyártó:** Camp Scandinavia

**Forgalmazó:** LBT Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 11-13.

Tel: 239-2282, 450-1416 Fax: 340-1309

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni szíveskedjen! **Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el**



Oldal:

