

7



A zsák rögzítése

Nyomja össze a zárógyűrűt kattanásig, ezáltal a zsák biztonságosan rögzül az alaplaphoz.

8



A zsák és az alaplap eltávolítása

A zsák:


1. Nyissa ki a zárógyűrűt úgy, hogy a kisebbik fület, ujjheggyel összenyomja.

2. A zacskót a tetejénél fogva kell egyidőben felfelé illetve elhúzni az alaplaptól. Ezt akkor a legkönnyebb elvégezni ha Ön a zsák felső részét megfogja.

Az alaplap:

Az alaplapot a tetejénél fogva óvatosan és lassan húzza le a bőrről, miközben a másik kezével tartsa a bőrét feszesen.

9

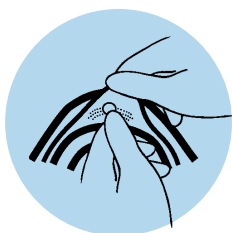

Szűrő

A szűrő letakarásához emelje meg a puha hátlapot és helyezze fel az öntapadó szűrőfedőt a szűrő jobb felső sarkába.

HU

Distributor
Coloplast A/S
Magyarországi Képviselete
H-1118 Budapest
Dayka Gábor u. 3
Tel. 1-226 1455
Fax: 1-226 1455

Manufacturer
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Denmark

www.coloplast.com



Coloplast and Alterna are registered trademarks of Coloplast A/S or related companies. © 2006-10. All rights reserved Coloplast A/S. Manufacturer: Coloplast A/S, DK-3050 Humlebæk, Denmark.



Free

1-részes és 2-részes zárt zsákok



Alterna



Bevezetés

Szűrő

A sztómaviselők időről-időre a zsák felfúvódását tapasztalhatják, a bélgáznak köszönhetően, ezért kénytelenek a zsákot éjszaka is kiüríteni. Az üríthető és a zárt zsákokhoz egyaránt kifejlesztett szűrő lehetővé teszi, hogy a zsák hosszabb ideig viselhető legyen, kisebb az eltömődés valamint a felfúvódás esélye és ugyanakkor csökkenti a folyadék és a kellemetlen szagok kiszivárgásának veszélyét. A csomagokban öntapadó szűrőfedők is találhatóak. Ezek használata akkor ajánlott ha Ön le akarja zárni a szűrőt, annak érdekében, hogy a szag ne szivároghasson ki a zsákból, vagy amennyiben zuhanyozni vagy fürödni óhajt.

A zsák kivitelezése

A zsákot végfelhasználók és szakemberek közösen tervezték meg, és különböző méretekben áll rendelkezésre.

Lágy borítás

Fürdés vagy zuhanyozás után egy törölköző segítségével törölje szárazra a zsákot.


Méretre vágás (ha szükséges)

A megfelelő méret kiválasztása elengedhetetlen. Minden egyes újrarendelés előtt, mérje meg a sztóma méretét egy sztómamérő segítségével. A sztóma alakja és mérete változhat, és ez szivárgást eredményezhet a sztóma körüli területen.

Amennyiben előre kivágott zsákot szeretne használni, olyan méretet válasszon, hogy az mindenféle ráhatás nélkül szorosan illeszkedjen a sztóma köré.


Amennyiben kivágható zsákot szeretne használni, úgy helyezzen egy mintát a zsákra és rajzolja meg a sztóma alakját. Vágja ki a megfelelő méretű nyílást egy ívelt élű ollóval. Soha ne vágjon az alaplapon található legnagyobb kör átmérőjénél nagyobb méretű nyílást.

Egyszeri használatra.

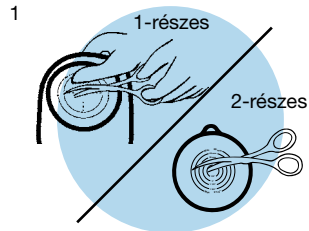


Méretre vágás

Rajzolja rá a sztómája méretét és alakját a védőfóliára. Vágja ki az alaplapot a sztóma pontos méretére és alakjára, hogy tökéletesen illeszkedjen a sztóma köré. A vágáshoz ívelt élű olló ajánlott. A sztóma körüli bőrfelületnek tisztának és száraznak kell lennie az alaplappal felhelyezésekor.

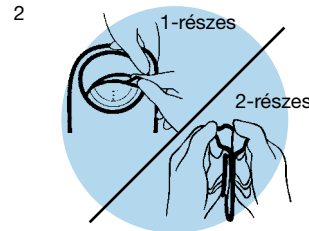


A védőfólia eltávolítása

Az egyik kezével fogja meg az alaplappal kis fülét, majd a másikkal húzza le a védőfóliát.

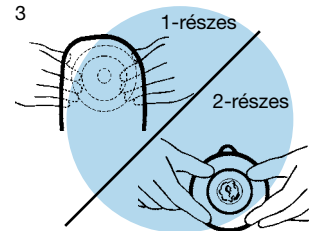


A tapadófelület felhelyezése

Helyezze a tapadófelületet a sztóma köré, majd ujjával lentől felfelé haladva határozottan simítsa rá a bőrre.

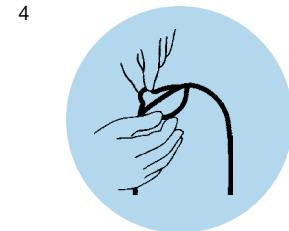


A zsák eltávolítása

Az alaplapot a tetejénél fogva óvatosan és lassan húzza le a bőrrel, miközben a másik kezével tartsa a bőrét feszesen.

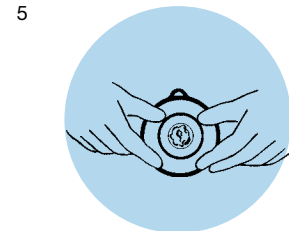

Az alaplappal felhelyezése

Helyezze az alaplappal a sztóma köré, majd ujjával lentől felfelé haladva határozottan simítsa rá a bőrre.

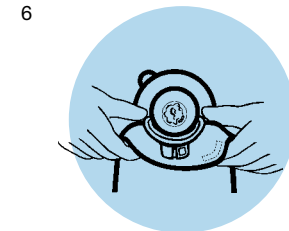

A zsák felhelyezése

Ellenőrizze, hogy a zárógyűrű nyitott állapotban legyen. Helyezze fel a zsákot az alaplappal úgy, hogy ujjával, alulról felfelé haladva, enyhe nyomást gyakoroljon a karimára. A művelet akkor tökéletes, ha halk kattanással jár. A zsák ekkor, a kényelmes viselet érdekében, tetszés szerint elfordítható. Egy kis gyakorlattal a felhelyezés egy kézzel is elvégezhető.