

# COMBIHESIVE® 2 S

Durahesive®  
Alaplap Durahesive tapadófelülettel

Durahesive® Flexibilis  
Alaplap flexibilis ragasztófelülettel

Konvex  
Alaplap Durahesive® tapadófelülettel


Használati utasítás




 ConvaTec

CE

ORKI 125/97

 EGYSZERI HASZNÁLATRA

 Olvassa el a használati utasítást.


Combihesive® 2 S Durahesive®, Durahesive® Flexibilis és a Konvex alaplapok kétrészes rendszerű COMBIHESIVE 2 S termékekhez.

A sztómán át távozó vialadék kezelésére. A COMBIHESIVE 2 S Konvex alaplap visszahúzódnak, bőrredőkben lévő, vagy egyébként nehezen kezelhető sztómákhoz.


**FIGYELEM:** Különös figyelemmel kell eljárni ragasztóanyagot tartalmazó eszközökkel a következő esetekben: nem-kontinens urosztóma, főképp, ha megauréterrel társul és hiányzik a vizelet reservoir. Ritkán fordul elő, hogy a betegek vizeletgyűjtő rendszeréből ragasztóanyag mutatható ki. Amennyiben a vizeletgyűjtő rendszerben kimutatható ragasztóanyag jelenléte, mérlegelni kell a ragasztóanyag jelenléte, mérlegelni kell a ragasztós termékek használatát és meg kell kezdeni a megfelelő klinikai kezelést.

## ALKALMAZÁS:


A kivezető nyílás körüli bőrfelületnek tisztának és száraznak kell lennie, mentesnek mindeféle oldószertől és zsírnemű anyagtól.

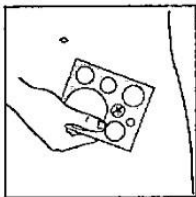

A mellékelt útmutató használatával válasszon egy olyan alaplapot, amelynek szorítógyűrűje legalább 10 mm-rel szélesebb, mint a sztóma legnagyobb átmérője.


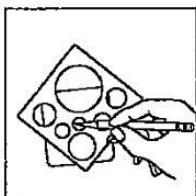


Rajzolja meg a sztóma pontos körvonalát az alaplap védőfóliájára.

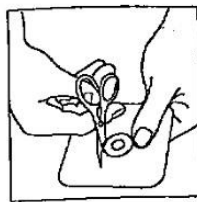

Vágja ki a nyomvonal mentén úgy, hogy legalább 5 mm bőrvédő réteget hagyjon a megnagyobbított induló lyuk és a karíma között. Távolítsa el a védőfóliát.


Előre kivágott alaplap esetében válasszon olyan méretet, mint a sztóma mérete. Ne nagyobbítsa meg az előre kivágott nyílást. Vegye le a védőfóliát.

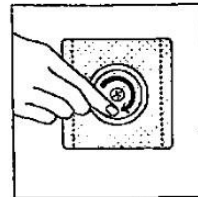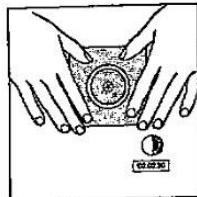

Győződjön meg róla, hogy az alaplap biztonságosan tapad. A terméket fürdés, zuhanyozás vagy úszás közben is fent lehet hagyni.

Helyezzen fel egy COMBIHESIVE 2 S zsákot (lásd a termék használati utasítását).


## ELTÁVOLÍTÁS

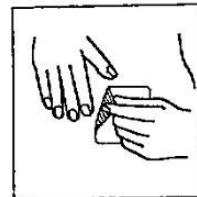

## HULLADÉKKEZELÉS

Tartsa szem előtt a helyi hulladékkezelési követelményeket/szabályokat.

## TÁROLÁSI FELTÉTELEK

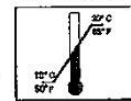

Tárolási hőmérséklet.



Tartsa száraz helyen. Kerülje a magas páratartalmat.

 Lot Szám

 Lejárató idő

Megjegyzés: Ha irritációt tapasztalna, forduljon orvoshoz, vagy egészségügyi szakemberhez.

A ConvaTec termékekkel kapcsolatos részletesebb információért keressen meg bennünket az alább megadott címen.

ConvaTec Limited, Deeside CH5 2NU, UK

<http://www.convatec.com>

Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.

Cím: Budapest 1119

Nándorfejérvári út 35.

06/80-201-201 (ingyenes zöldsorszám).

© 2000 Squibb

© az E.R. Squibb & Sons Inc. és leányvállalatának bejegyzett védjegye.