





# COMBIHESIVE® 2 S


## Alakítható bőrvédő alaplap


### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 - Egyszer használatos.


 - Figyelem: olvassa el a használati utasítást.

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK

 - Tárolási hőmérséklet

 - Száraz helyen tartandó. Védje a magas páratartalomtól

 - Gyártási szám

 - Lejáratási idő

### TERMÉKLEÍRÁS

A ConvaTec Combihesive® 2S alakítható bőrvédő alaplap, amely mérőeszköz és olló igénybevétele nélkül lehetővé teszi az alaplapon a sztómányílás alakítását, hogy az megfeleljen a sztóma formájának és méretének. Ez az alakítható alaplap Stomahesive® anyagot tartalmaz a bőrrel és a sztómával érintkező oldalán. Az alaplap bőrrel nem érintkező oldala Durahesive® anyagot tartalmaz. Ez az eszköz egy kétrészes sztómaterápiás rendszer része, melyet a ConvaTec Combihesive® 2S kétrészes zsákkal együtt kell használni.

### JAVALLATOK

A sztóma ellátására.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

**FIGYELMEZTETÉS:** Óvatosan használja az öntapadó termékeket az egy szintben levő urosztómánál, különösen, amikor uréter katéterrel van összekötve és nincsen vizeletgyűjtő zsák. Ritkán, ezeknél a betegeknél, klinikai jelentések ragasztó jelenlétéről számolnak be a vizeletgyűjtő rendszerben. Ha a húgyvezetékben nagy mennyiséget észlelnek, gondolja át az öntapadó termék további használatát, és kezdeményezze a megfelelő klinikai ellátást.

**Megjegyzés:** Irritáció esetén függessze fel a termék használatát és keresse fel kezelőorvosát.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### A BŐRVÉDŐ ALAPLAP ELŐKÉSZÍTÉSE

Kezének és a sztóma körüli bőrnek tisztának, száraznak és bármilyen oldószertől vagy olajos anyagtól mentesnek **kell** lennie.

Mielőtt elkezdí a bőrvédő alaplap előkészítését, olvassa el ezt a részt, hogy megismerje a műveletet.

1. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő méretű ConvaTec Combihesive® 2S alakítható konvex bőrvédőt választotta.
2. Nyissa ki az alaplap csomagolását és vegye ki azt. Ekkor még ne távolítsa el az alaplapról az átlátszó műanyag védőlapot vagy a fehér fedőpapírt.



3. A sztóma nyílásának kialakításához helyezze hüvelykujját (vagy ujjait) a kezdő lyuk szélére, és kezdje el **görgetni** a bőrvédő alaplapot visszafelé. Görgesse tovább ujjával az alaplapot, amíg a kívánt méretű és alakú nyílást ki nem alakítja. **Ne görgesse a termék címkéjén feltüntetett mérethatáron túl.**

**Megjegyzés:** Ajánlatos az alaplapot **közvetlenül alakítás** után felhelyezni. Mivel ez egy **alakítható termék**, nem ajánlott ollót használni.

A sztómányílás kialakítása után távolítsa el az átlátszó műanyag védőlapot az alaplapról, és térjen át az „Alaplap felhelyezése” című részre. Ekkor még ne távolítsa el a fehér fedőpapírt!

#### AZ ALAPLAP FELHELYEZÉSE

Kezének és a sztóma körüli bőrnek tisztának, száraznak és bármilyen oldószertől vagy olajos anyagtól mentesnek kell lennie.



1. Helyezze az alaplapon lévő sztómányílást a sztóma fölé, és nyomja a bőrvédő alaplapot a helyére.



2. A sztómához közel eső széleket simítsa el ujjával, ha szükséges, hogy biztosítsa a kényelmes illeszkedést az alaplap és a sztóma között. Nyomja le az alaplapot és körkörös mozdulatokkal simítsa bőrre, hogy megfelelő tapadást biztosítson.



3. Tartsa az alaplapot legalább 30 másodpercig a sztóma körül.



4. Távolítsa el a fehér fedőpapírt és nyomja a tapadó szegélyt a bőrre, elsimítva a ráncokat.

#### A ZSÁK FELHELYEZÉSE

Válasszon megfelelő méretű ConvaTec Combihesive® 2S sztóma zsákot.



A zsák felhelyezése előtt gyengén hajtsa ki a zsákot a rajznak megfelelően és így hagyjon egy kis mennyiségű levegőt a zsákba kerülni.

Csatlakoztassa a zsákot a bőrvédő alaplaphoz a következők szerint:



Az alaplap és a zsák közötti biztonságos záródás érdekében nyomja a zsákon lévő gyűrű alsó részét az alaplapra és simítsa körbe felfelé. Eközben több 'kattanó' hangot hallhat.

#### LEERESZTŐS SZŰRŐS ZSÁK ESETÉN



Bármilyen vízi tevékenység esetén (fürdés, zuhanyozás vagy úszás) takarja le a szűrő nyílását a mellékelt szűrőre ragasztható öntapadó lapocskával. A zsák felfújódását elkerülendő, ne felejtse el eltávolítani a szűrőt takaró lapocskát a vízi tevékenység befejezése és a zsák megszáradása után.

**MEGJEGYZÉS:** A szűrő esetleg nem működik megfelelően, ha vizes lesz.

#### ZSÁK ELTÁVOLÍTÁSA




#### AZ ALAPLAP ELTÁVOLÍTÁSA



A bőrvédő alaplap eltávolításához tartsa egyik kezét a bőrén és a másik kezével finoman húzza le a bőrvédő alaplapot a bőréről.

#### AZ INVISICLOSE® ZÁRÓFÜL RENDSZER HASZNÁLATA

##### A ZACSKÓ ZÁRÁSÁNAK LÉPÉSEI:

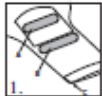

Az InvisiClose® zárófül rendszer (1) tartalmaz egy biztonsági hajtókát (A), zárófelületeket (B) és kivezető fület (C).



Hajtsa a biztonsági hajtókát a zsák eleje felé vissza azért, hogy láthatóvá tegye a zárófelületeket. (2)



A kivezető fület tekerje fel maga felé négyszer és biztosítsa, hogy a zárófelületek fedve legyenek. (3)



Nyomja össze a zárófelületeket addig, amíg érzi, hogy a teljes hosszuk mentén bezáródnak (KLIKK hang). (4)




Hajtsa a biztonsági hajtókát a zacskó hátulja (test felőli oldala) felé és nyomja össze a zárófelületeket addig, amíg összezáródásukat nem érzi. (KLIKK hang). (5)

#### ÚTMUTATÓ A ZSÁK LEERESZTÉSÉHEZ:



Fordítsa a zsák hátsó (test felőli) részét önmaga felé. Óvatosan emelje fel a biztonsági hajtókát önmaga felé azért, hogy az kinyíljon. (6)

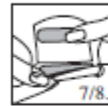

Mialatt a biztonsági hajtókát a zsákkal szemben tartja, nyissa ki a zárófelületeket úgy, hogy a sarkot felemeli (7) és hajtsa ki négyszer a kivezető fület (8).



A leeresztés és/vagy tisztítás lehetővé tétele céljából kinyithatja a kivezető fület úgy, hogy mindkét végét benyomja a hüvelyk- és a mutató ujjával. (9)

Igény esetén, a zsák zárófülét meg lehet tisztítani vízzel és enyhe szappannal. Gyengéden törölje szárazra.

#### A ZÁRÓKAPOCS HASZNÁLATA:




#### A HAJLÍTOTT ZÁRÓKAPOCS HASZNÁLATA:



#### AZ UROSTÓMÁS ZSÁK LEERESZTŐ ACCUSEAL® CSAPJÁNAK HASZNÁLATA:



Az éjszakai vizeletgyűjtő rendszerhez való csatlakoztatáshoz:

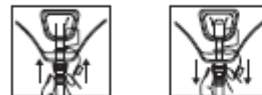

#### A HAJLÍTHATÓ LEERESZTŐ CSAP HASZNÁLATA:



Az éjszakai vizeletgyűjtő rendszerhez való csatlakoztatás:



Ez a terméket viselheti fürdés, zuhanyozás vagy úszás közben is. Szűrős zsákoknál fedje be a szűrőt a mellékelt szűrőt takaró lapocskákkal. Vízi tevékenység után gyengéden szárítsa meg.

#### HULLADÉKKEZELÉS

Kérjük, figyeljen a helyi hulladékkezelési szabályozásokra.

ConvaTec termékekről való további információért keressen fel minket az alábbi címen:



ConvaTec Inc.  
Skillman, NJ 08558  
1-800-422-8811

ConvaTec Limited, Deeside, CN5 2NU, UK  
www.convatec.com

© 2008 ConvaTec Inc.  
®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.

Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Ingyenes zöld szám: 06 80-201-201