

# Alterna®

sztóma-zacskó  
egyrészes nyíltvégű

# Coloplast



**Használati útmutató**

23315972 Version 1

Coloplast logó Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. ©  
A Velcro® a Velcro Industries B.V tulajdona  
(2014-06-20)

## Javallat

A sztómazacskó a sztómán kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az öntapadó felszín a zacskó rögzítésére, és a sztóma körüli ép bőrhöz való ragasztásra szolgál.

## Információ

A terméket vízszintes helyzetben, hűvös és száraz körülmények között tárolja - ne fagyassza.

Alkalmazás előtt várjon, amíg a termék felveszi a szobahőmérsékletet. Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

## Vigyázat


Mielőtt konvex terméket használ, forduljon egészségügyi szakemberhez.

## Figyelmeztetés


Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy fertőzés fokozott kockázatával jár.

## Alkalmazási és eltávolítási útmutató

### Előkészítés

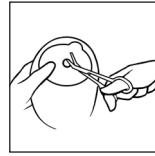


Ívelt végű kis olló és méretvételi sablon használatával készítsen a tapadó felszínen a sztóma pontos méretének és alakjának megfelelő nyílást. A sztóma méretének és formájának méréséhez használhatja a mellékelt sztóma mérőszablont. A szivárgás és a bőrproblémák kockázatának csökkentése érdekében fontos, hogy az öntapadó felszínen a nyílás pontosan illeszkedjen a sztóma köré.

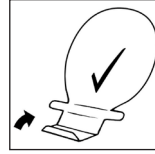


### Elrejthető üritő használata

Helyezze a zacskót síma felületre, öntapadó felszínével lefelé. Zárja le az üritőrészt, az alsó rész háromszori feltekerésével, hogy láthatóvá váljék a tépőzárás csík.

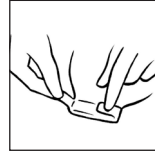

A tépőzár rögzítéséhez hajtsa a két fület befelé.

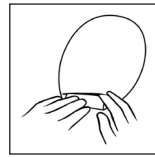


Az üritőrésszel elrejthető a nem szőtt bélésanyag alá.

### Csat, klipsz használata

Távolítsa el a klipszet az ívről, majd távolítsa el a védőpapírt is. Az öntapadó felszínével lefelé helyezze az üritőnyílásra. Ha a klipsz megfelelő elhelyezése nem sikerül elsőre, távolítsa el, és helyezze fel újra. A bőr felé haladva hajtson rajta négyet-ötöt, majd hajtson vissza a klipsz végeit. Merev csat esetén csak egyszer hajtson vissza a zacskót a csattal való lezárás előtt.


## Felhelyezés

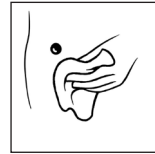

Alaposan tisztítsa meg a sztómat és a környező bőrfelületet. A tapadó felszín felragasztása előtt a bőrnek teljesen száraznak kell lennie.



Húzza le a védőfilmet az öntapadó felületről.

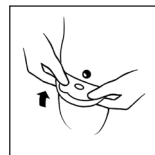


Hajtsa vissza az öntapadó felszínt, illessze a sztóma köré, és nyomja rá határozottan a bőrre.




Gyakoroljon nyomást a zacskóra, hogy a tapadás erős legyen és az öntapadó felszín tökéletesen illeszkedjen a sztóma körüli bőrre.

### Zacskó ürítése

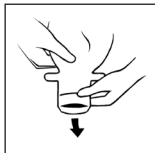

Nyissa meg a leeresztőrészt és szükség esetén ürítse ki a zacskót a WC-be.

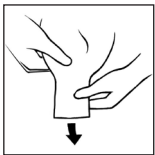

Tisztítsa meg a leeresztőrészt, akár WC-papírral. Miután kiürítette a zacskót, tekerje fel a leeresztőrészt és ismét rögzítse.



### Eltávolítás




Az öntapadó felszínen lévő fül felemelésével óvatosan húzza el a zacskót a hasról, és lassan gördítse le a tapadó felületet.

Az eltávolítást segítő, szabad kezével alkalmazzon a bőrén kis nyomást.

A termék egyszerhasználatos és normál háztartási hulladékként kezelendő. Ne dobja a zacskót a WC-be.

### Szagszűrő címke

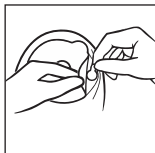

Szükség esetén helyezze fel az egyik mellékelt szagszűrő címkét a szagszűrőre, hogy a gázok ne jussanak ki.