

Használati utasítás

23317863 Version 1

A Coloplast logó a Coloplast A/S bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. ©
2016-02-12

Javallatok

A sztómazacskó a sztóman kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az öntapadó felszín a zacskó rögzítésére, és a sztóma körüli ép bőrhöz való ragasztásra szolgál.

Tudnivalók

A termék vízszintes helyzetben tárolandó

Napfénytől elzárva tartandó.

A Coloplast semmiféle felelősséget nem vállal az olyan sérülésekért vagy károkért, amelyek a terméknek a Coloplast jelen ajánlásainak meg nem felelő használatából adódnak.

Figyelmeztetés


Mielőtt konvex terméket használ, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Vigyázat


Az egyszer használatos termék ismételt használata potenciálisan veszélyes lehet a felhasználóra. Az újrafeldolgozás, a mosás, a fertőtlenítés és/vagy a sterilizálás nyomán a termék jellemzői megváltozhatnak, ami növeli a fizikai sérülés és a fertőzés kockázatát a felhasználó számára.

Felhasználás

Előkészítés

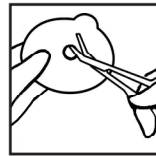

Kisméretű, hajlított olló és az alaplapon található kivágási segédlet használatával vágjon a sztóma méretének és alakjának pontosan megfelelő nyílást az alaplapon. A sztóma méretének és formájának méréséhez használhatja a mellékelt sztóma mérőszablont. A szivárgás és a bőrp problémák kockázatának csökkentése érdekében fontos, hogy az öntapadó felszínen a nyílás pontosan illeszkedjen a sztóma köré.

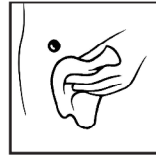


Alaposan tisztítsa meg a sztómat és az azt körülvevő bőrterületet. Az alaplap felhelyezése előtt a bőrnek teljesen száraznak kell lennie.


Alkalmazás




Húzza le a védőfilmet az öntapadó felületről.

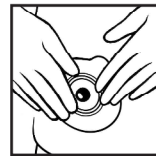

Igazítsa az alaplapot a sztóma köré, és alkalmazzon nyomást az alaplapra, hogy gyors tapadást és tökéletes illeszkedést érjen el a tapadó felszín és a sztómat körülvevő bőr között. A tapadó felszínnek szorosan illeszkednie kell a sztóma köré. A szivárgás megelőzéséhez fontos tökéletes szigetelést biztosítani a sztóma körül. Amikor nyomást alkalmaz a hasonló alaplapra illetve zsákra, a sztóma körüli területen kezdve nyomja a tapadó felszínt a bőrhöz. Egyik ujját vezesse körbe a sztóma körül, hogy a tapadó felszín biztosítsa a szigetelést. A sztómatól kiindulva és kifelé, a szélek felé haladva simítsa le a tapadó felszínt annak biztosítására, hogy a tapadó felszín szorosan illeszkedjen a bőrhöz.

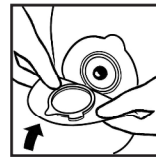

Gondoskodjon arról, hogy az alaplap száraz és tiszta legyen (az alaplap tisztítására csak vizet használjon). Győződjön meg arról, hogy a zárógyűrű nyitva van-e. Helyezze a zsák csatlakozó gyűrűjének alját az alaplap csatlakozó gyűrűjének aljához.

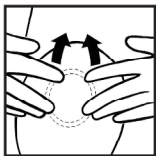

Középső ujjával nyomja össze alul a zsákot és az alaplapot.




A zárat összenyomva zárja le a zárógyűrűt. Amikor kattantást hall, a zsák biztonságosan rögzítve van az alaplaphoz.




Eltávolítás

Ujja hegyével megnyomva a kis fület, nyissa ki a zárógyűrűt, és távolítsa el a zsákot.

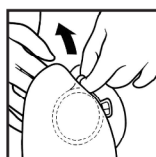

Tartsa meg az eltávolításra szolgáló fület, és vegye le a zsákot, óvatosan az alaplaptól elhúzva azt.

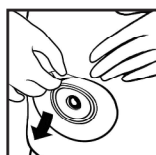

Gyengéden távolítsa el az alaplapot, ehhez húzza el az alaplapon lévő, eltávolításra szolgáló fület a hastól, és az alaplapot lassan gördítse le. Az eltávolítást segítő, szabad kezével alkalmazzon a bőrén kis nyomást.

Hulladékba helyezés

A termék kizárólag egyszeri használatra szolgál, és a helyi irányelveknek megfelelően kell kidobni, pl. a közösséges háztartási hulladékkal.

Ne húzza le vécén a terméket.

Szagszűrő címke



Szükség esetén helyezze fel az egyik mellékelt szagszűrő címkét a szagszűrőre, hogy a gázok ne jussanak ki.