

Cuticerin[◊]

Enyhén tapadó kötszer

[STERIL] Gamma besugárással sterilizálva.

Nem használható fel, amennyiben a csomagolás nyitott vagy sérült.
Egyszeri használatra. Nem újratesterilizálható. Száraz helyen tartandó (< 25 °C)

Leírás

A CUTICERIN egy sima felületű poliacetát túllból készült kötszer. Víztaszító külső rétegének összetétele petrolátumon (vazelin), paraffinon és gyapjú-viaszalkoholon (EUCERITE™) alapul.

Javallatok

Felületes váladékozó sebek kezelésére úgymint,

- Égési sérülések
- Sugárzás hatására kialakuló sérülések
- Horzsolások
- Bőráttétetés donorterülete

Ellenjavallatok

A termék nem használható olyan betegeknek, akiknél ismert allergia áll fenn az alkotórészek valamelyikével szemben:

- Petrolátum,
- Parfin,
- Gyapjú-viaszalkohol.

Óvintézkedések

Nincs szükséges óvintézkedés

Jellemzők

- Enyhén tapad
- Csökkenti a kötőszövetek jelentkező fájdalmát
- Levesz az annak kockázatát, hogy a granulációs szövet belenőjön a kötszerbe
- Légáteresztő, a váladék számára szabadon átjárható

Használati utasítás

1. Nyissuk ki a csomagot a perforációnál.
2. Csípéssel vagy steril kesztyűvel vegyük ki a kötést.
3. Finoman helyezzük a kötést a sebfelületre.
4. Ha szükséges, használjunk nedvszívó anyagot a felesleges váladék felszívására.
5. Rögzítsük a kötést pólyával vagy öntapadó anyaggal.

Csomagolási típusok és méretek

66045560	7,5 cm x 7,5 cm	50 db/doboz
66045561	7,5 cm x 20 cm	50 db/doboz
66045562	7,5 cm x 7,5 cm	10 db/doboz
66045563	7,5 cm x 20 cm	10 db/doboz
66045503	7,5 cm x 20 cm	25 db/doboz x 3
66045564	10 cm x 10 cm	10 db/doboz
66045502	20 cm x 40 cm	25 db/doboz

Gyártó

Készült Kanadában Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England részére

◊ A Smith & Nephew bejegyzett márkanevei

© Smith & Nephew, 2004

www.smith-nephew.com

CE 0086