

Javallat

A CombiDERM® a közepesen és erősen váladékozó sebek kezelésére alkalmas.

- Akut sebekre: horzsolásra, felszakadt sebekre, műtéti sebekre.
- Krónikus sebekre: lábszárfekélyre, diabéteszes lábsebekre, nyomási fekélyekre.

Hatásmechanizmus

A CombiDERM® egy nagy nedvszívóképességű kötszer, mely három fő részből áll: hidrokolloid tapadó felületről, középső abszorbens sziget-részből és elgélesedő poli-akrilát granulátumból.

A nagy nedvszívóképességű granulátumok felelősek a váladék felszívásáért, elgélesednek és a bőrtől elzárva magukban tartják a váladékot. A kötszer segíti a sebgyógyuláshoz szükséges, nedves sebkörnyezet megteremtését is. A vízzáró és baktériumgátként működő külső filmréteg segítségével megelőzhető a váladék átütődése és a keresztfertőzés.

Alkalmazás

Válasszon akkora kötszert, mely középső szigetének mérete nagyobb a seb méreténél. Távolítsa el a kötszer hátlapján található papírt, és helyezze a kötszert közvetlenül a sebre. A kötszer abszorbens része megduzzad és megpuhul, ahogy felszívja a sebváladékot.

A kötszert eltávolításkor finoman a sebre kell nyomni, ezután óvatosan felemelni a kék fülecskét és ennek segítségével teljesen visszahajtva eltávolítani.

A CombiDERM® elsődleges kötszerként is használható vagy másodlagos kötszerként együtt alkalmazva egyéb megfelelő kötszerrel, mint például az AQUACEL®, a Kaltostat® vagy a GranuGEL®.

CombiDERM®

Külső filmréteg:

- *vízzáró és baktériumgát.*^{3,*}

Nedves sebkörnyezetet biztosít:

- *optimális sebgyógyulási körülmények.*

Flexibilis hidrokolloid szigetkötszer:

- *a sebhez idomul.*

Megköti és elzárja a váladékot:

- *kisebb a maceráció¹ kockázata.*

A sebbel érintkező réteg nem tapad:

- *atraumatikus eltávolítás.*^{1,2}

Kompressziós kezelésnél is nagy hatékonyságú:

- *kisebb a maceráció¹ kockázata.*

*In vitro

Abszorbens hidrokolloid szigetkötszer

A kötszer sebbel érintkező, középső részén lévő szigetlap nem tapadó rétegű, melyet tapadó, hidrokolloid szegély vesz körül. A köztes szigettrész granulátumokat tartalmaz, melyek felszívják a váladékot és gélszerű réteget képeznek, a kötszer szerkezetén belülre zárva a folyadékot.

COMBIDERM®

A CombiDERM® nedves sebkörnyezetet tart fenn, miközben felszívja és a sebtől elzárja a felesleges váladékot. A CombiDERM® kompressziós kezelésnél is magában tartja a nedvességet, megelőzve a maceráció¹ kialakulását és hosszabb kihordást^{1,2} tesz lehetővé.

A CombiDERM® vékony, flexibilis és jól idomul a legkülönbözőbb helyeken található sebekhez. A külső poliuretán filmréteg vízálló, kirekeszti a baktériumokat, így védelmet nyújt a felülfertőződéssel szemben.



A CombiDERM® többféle méretben beszerezhető, mind otthoni, mind kórházi használatra a különböző sebtípusokra:

Kötszer	Sziget mérete	Kötszer / doboz	Termékkód
10 x 10 cm	5 cm x 5 cm	10	651031CW
14 x 14 cm	7,5 cm x 7,5 cm	10	187725CW
15 x 18 cm 	8 cm x 11 cm	10	651028CW

Referenciák:

1. Cutting K et al. CombiDERM in the treatment of Chronic Wounds: A selection of case histories. Presented at EWMA, Harrogate, 1997.
2. McInnes A. The treatment of diabetic foot ulceration with a hydrosorbative wound dressing. Presented at Tissue Viability Society Meeting, London, 1997.
3. Ameen et al. Investigating the bacterial barrier properties of four contemporary wound dressings. Journal of Wound Care 2000 9 (8) 385-387.
4. Hudak J et al. An in-vitro evaluation of the fluid absorption capabilities under compression of a new non-adhesive composite dressing, data on file (1998).